




PRESSALIT®

| | |
|-------------------------------------|--|
| Product Varunummer | SCT 2000 duschbrits, perforerat canvastyg, elektrisk höjdregerbart R8581218000 |
| Färg | VVS:777543720 RSK:8565080 EAN:5708590376103 HMI: 140137 NBS:N13:40,375 Vit |
| Beskrivning |  <p>Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn.</p> <p>Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra.</p> <p>Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren.</p> <p>SCT 2000 duschbrits, eldriven, höjjusterbar 700 mm; från 300 mm - 1 000 mm, med manöverdosa.</p> <p>Uppfällbar. Inkl. sänggridd och vattenuppsamlingskäril med integrerat avlopp</p> <p>Utvändiga mått: 910 mm x 1 800 mm.</p> <p>Liggytan i perforerat canvastyg, 550 x 1 650 mm.</p> <p>Exkl. monteringskrav för vägg.</p> |
| Justerbar | Höjdregerbart |
| Höjjustering | 700 mm |
| Produktkapacitet | Maximal användarvikt (MUM): 200 kg. Maximal belastning (SWL): 200 kg. Vid 200 kg maxbelastning på duschbritsen, belastas varje skruv med 26 kg. <i>Britsen har testats statistiskt med 500 kg, enligt kraven i IEC 60601-1-standarden som kräver testning med säkerhetsfaktor 2,5.</i> |
| Uppåtgående hastighet | Hastighet upp: 19 mm/s Hastighet ner: 21 mm/s |

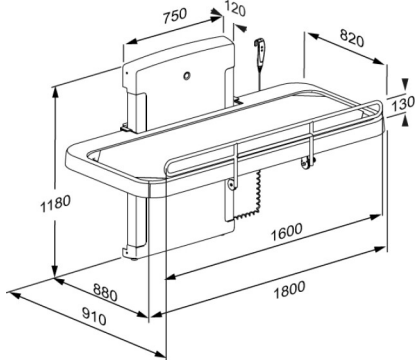

| | |
|--|---|
| Product Varunummer | SCT 2000 duschbrits, perforerat canvastyg, elektrisk höjdregerbart R8581218000 |
| Ljudnivå | 50 dB |
| Material | Konstruktion i pulverlackerat rostfritt stål, nätöverdrag i PVC-belagd polyester (för extra tålighet), och vattenuppsamlingskär i PVC-U och täckande överdrag i polystyren |
| Ergonomi | 2000-serien har en låg starthöjd för att förenkla förflyttning till britsen. Seriens britsar har dessutom ett perforerat kanvastyg som låter vattnet passera ned till uppsamlingskärlet undertill. Både brukare och vårdgivare kan dra fördel av flexibiliteten - rätt höjd är precis lika viktig för vårdgivarens säkerhet som för brukarens komfort. |
| Funktioner | Vattenuppsamlingskärlet med integrerad dränering förhindrar att personal och golv blir nerstänkta. Slangen från det centralt placerade avloppet i vattenuppsamlingskärlet går till afloppet i golv eller vägg. Duschbritsen kan fällas upp mot väggen så att den tar minsta möjliga plats när den inte används. El-duschbritsen levereras med manöverdosa. De röda tryckknapparna indikerar tydligt "upp" och "ner". Manöverdosan levereras med väggbeslag. Britsens canvastyg kan enkelt tas av när det ska tvättas eller bytas ut. |
| Anslutnings ström (V) | 230 |
| Motor | LA40 Careline (Linak), 4000 N, IPX6 |
| Kontrollbox | CA63 Careline, (Linak), IPX6 |
| Manöverdosa | HB30 (Linak), IP66 |
| Strömförbrukning (max.belastning) | Strömförbrukning vid maximal belastning: 420 W Strömförbrukning vid standby: 0,5 W |
| Garanti | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar. |




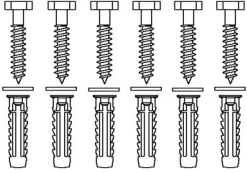
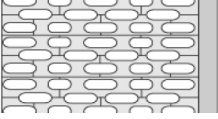
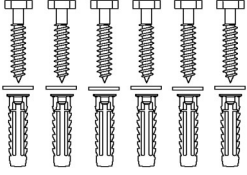
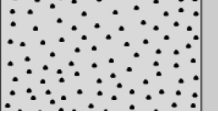
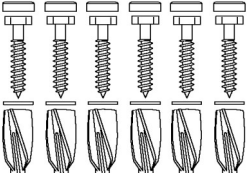
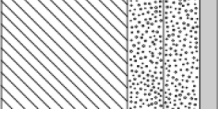
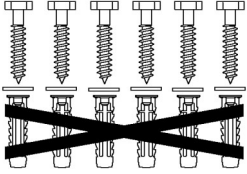


| | |
|-------------------|---|
| Product | SCT 2000 duschbriks, perforerat canvastyg, elektrisk höjdregerbart |
| Varunummer | R8581218000 |
| Rengöring | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |
| WEEE | Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet. |









| | |
|-------------------|--|
| Product | SCT 2000 duschbriks, perforerat canvastyg, elektrisk höjdregerbart |
| Varunummer | R8581218000 |

Montage i olika väggtyper
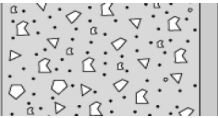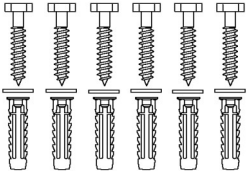
| | | |
|---|--|---|
|  | Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat. |  |
|  | Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat. |  |
|  | Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat. |  |
|  | Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat. |  |
|  | Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat. |  |

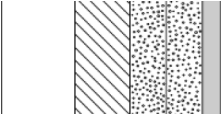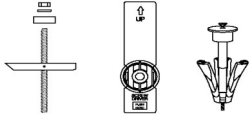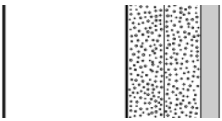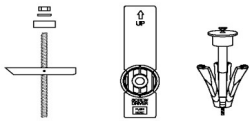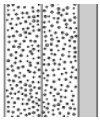

| | |
|---|---|
| Product Varunummer | SCT 2000 duschbrits, perforerat canvastyg, elektrisk höjddreglerbart R8581218000 |
|  | Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.  |
|  | Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.  |
|  | Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.  |

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.