




PRESSALIT®

Product Varunummer	VALUE toalettarmstöd, 850 mm R1085000
Färg	VVS:615892502 NRF:6191056 RSK:7828178 EAN:5708590346861 HMI: 138199 FDA:ILS/D135866 Vit
Beskrivning	 <p>VALUE och VALUE II toalettstöd med ALBA vingmonteringsprofil är speciellt utformade för användning med SELECT TL3 och TL4 toalettlyftare. Höjdjustering av den elektriska toalettlyften görs med hjälp av en manöverpanel som ingår i toalettstödet.</p> <p>VALUE toalettarmstöd, 850 mm, uppfällbart, höjdreglerbart 150 mm utan verktyg (vänster hand manövrerad). En bra hjälp när du sitter, står eller flyttning till och från toaletten. Material: Stål med en Rilsan-belagd yta, gjuten aluminium, ändpropp är gjord av nylon (PA). Till eftermontering på TL3/TL4 elektrisk/manuell upphängning till toalett, monteringsprofil medföljer. Montering högersidig för brukar.</p>
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	150 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 120 kg
Material	Toalettarmstöden är tillverkad av rostfritt stål med en Rilsan-belagd yta som är skön att röra vid, lätt att rengöra och skyddar mot rost. Monteringsprofil i gjuten aluminium. Ändpropp är gjord av nylon (PA).
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

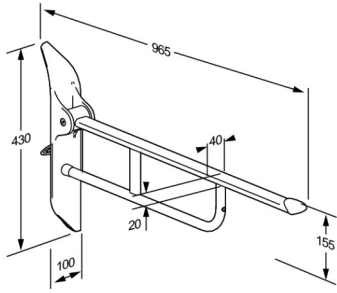

Product	VALUE toalettarmstöd, 850 mm
Varunummer	R1085000
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kilto Clean)</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>