


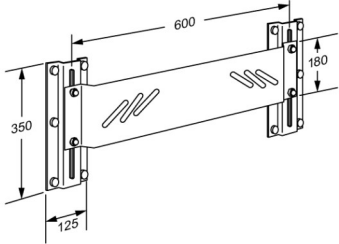

Produkt Varenummer	VALUE vaskophæng, manuelt højderegulérbart R1214000
Farve	VVS:654011410 NRF:6191676 EAN:5708590176499 HMI: 25578 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473 Hvid
Produktbeskrivelse	 <p>Vægkonsol med plade, 150 mm højderegulerbar. (Anbefales med til- og afløbssystem R2065/R2067)</p> <p>HMI-nr.: 25578</p> <p>Vægkonsol med plade, 150 mm højderegulerbar. (Anbefales med til- og afløbssystem R2065/R2067)</p>
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulérbar 150 mm Maksimal belastning: 80 kg. Passer til vaske der vejer op til 22 kg. Når vasken belastes med 80 kg, belastes hver vægmonterings skrue med 22 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 80 kg og vasken vejer 22 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 77 kg støtter sig til vasken.
Materialer Ergonomi	Basismateriale: Stål Overflademateriale: Rilsan Højderegulérbare vaskophæng er velegnede til fx plejehjem. Indstillingsmulighederne gør brugerne mere selvhjulpne og forbedrer hjælpernes arbejdsbetingelser.



Produkt	VALUE vaskophæng, manuelt højderegulerbart
Varenummer	R1214000
Funktioner	Manuel højderegulering er velegnet, når højden på håndvasken blot skal reguleres en gang imellem.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
Overenstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.



PRESSALIT®

Produkt	VALUE vaskophæng, manuelt højderegulérbart
Varenummer	R1214000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®