




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS duschsits 450, elektrisk höjdglerbart och manuellt sido reglerbar R7664000
<b>Färg</b>	Vit
<b>Beskrivning</b>	<p>VVS: 777517400 NRF: 6317153 EAN: 5708590360263 HMI: 124227</p>  <p>PLUS duschstolar erbjuds i flera färger. De finns både som fasta, elektriskt justerbara och manuellt justerbara, med och utan hål, och med möjlighet till rygg och armstöd. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor.</p> <p>PLUS duschsits 450, uppfällbart, med rygg- och armstöd. Höjdglerbart 500 mm, eldriven med manöverdosa och manuellt sido reglerbar. Uppfällbara armstöd kan höjdgleras oberoende av sits och ryggstöd. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. Till eftermontering på existerande vågrät PLUS väggskena (medföljer ej).</p>
<b>Justerbar</b>	Höjd- och sidoreglerbar
<b>Höjdglering</b>	500 mm
<b>Produktkapacitet</b>	<p>Max brukarvikt (sits): 150 kg Max belastning armstödd: 55 kg När duschsitsan belastas med 150 kg, belastas varje fästskruv med 35 kg.</p> <p><i>PLUS duschsitsar testas statistiskt med säkerhetsfaktor 2,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmiddel.</i></p>
<b>Uppåtgående hastighet</b>	Hastighet upp: 10 mm/s Hastighet ner: 10 mm/s
<b>Ljudnivå</b>	48 dB
<b>Material</b>	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS.

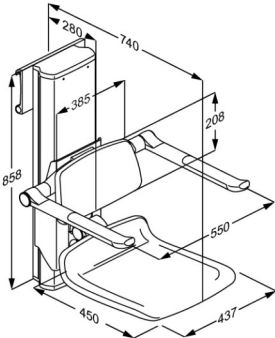

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS duschsits 450, elektrisk höjdglerbart och manuellt sido reglerbar R7664000
<b>Ergonomi</b>	Ergonomisk sits - säte 450 x 437 mm.. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Armstödens ovala form gör dem lätta och bekväma att hålla, och ger bra stöd.
<b>Funktioner</b>	Både sits och armstöd kan fällas upp mot väggen efter användning. Sits, rygg- och armstöd kan justeras parallellt via ett enkelt och säkert klicksystem. Armstöden kan dessutom höjdgleras oberoende av sits och ryggstöd. Med elektrisk manövrering är det möjligt för vårdgiveren att ställa in sitsen till en bra arbetshöjd medan brukaren sitter på sitsen.
<b>Anslutnings ström (V)</b>	230
<b>Motor</b>	LA40 (Linak) 6000N, IPX6
<b>Kontrollbox</b>	SMPS14 (Linak) IPX6
<b>Manöverdosa</b>	HB3 (Linak) IP66
<b>Strömförbrukning (max.belastning)</b>	Strömförbrukning vid maximal belastning: 60 W Strömförbrukning vid standby: 0,5 W
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS duschsits 450, elektrisk höjdregerbart och manuellt sido reglerbar R7664000
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Erisan OXY+ Tvättspirit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> <p>Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.</p>
<b>WEEE</b>	