


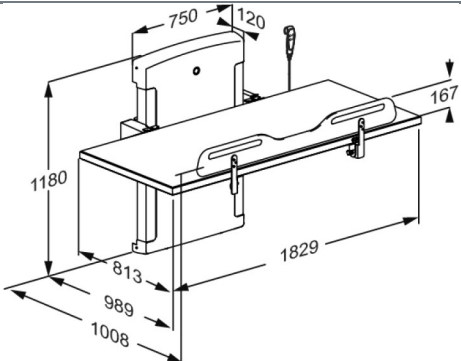

PRESSALIT®

Product Varunummer	CT 4100 vårdbrits, elektrisk uppfällbar, elektrisk höjddreglerbart R8585572000
Färg	Vit
Beskrivning	<p>VVS: 777541200 EAN: 5708590358147 HMI: 125837</p>  <p>Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjddjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn.</p> <p>Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra.</p> <p>Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren.</p> <p>CT 4100 vårdbrits, elektrisk uppfällbar. Elektrisk höjddreglerbart 700 mm; från 300 mm - 1 000 mm, med tryckknappar i framkant. Inkl. sänggrind, kroppsbalte och manöverdosa. Liggyta 813 x 1 829 mm, av kompakt laminat. Utvändiga mått 1 008 mm x 1 829 mm. Exkl. monteringskrav för vägg.</p>
Justerbar	Höjddreglerbar
Höjddjustering	700 mm
Produktkapacitet	Maximal användarvikt (MUM): 227 kg. Maximal belastning (SWL): 232 kg. Vid 227 kg maxbelastning på vårdbritsen, belastas varje skruv med 37,5 kg. <i>Britsen har testats statiskt med 580 kg, enligt kraven i IEC 60601-1-standarderna som kräver testning med säkerhetsfaktor 2,5.</i>
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 15 mm/s Hastighet ner: 20 mm/s



PRESSALIT®

Product Varunummer	CT 4100 vårdbräns, elektrisk uppfällbar, elektrisk höjreglerbart R8585572000
Ljudnivå	48 dB
Material Ergonomi	<p>Pulver-lackerat rostfritt stål, liggyta i kompakt laminat.</p> <p>Den ergonomiskt utformade sänggrind har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av -och påklädning av brukare.</p> <p>Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier.</p>
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA40 Careline (Linak) 4000 N, IPX6
Kontrollbox	CA63 Careline (Linak), IPX6
Manöverdosa	HB30 (Linak) IP66
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 420 W Strömförbrukning vid standby: 2 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.




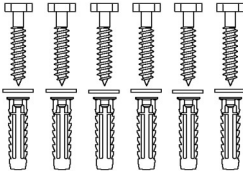
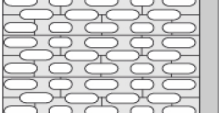
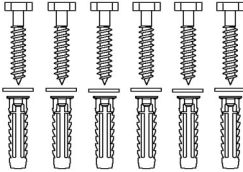
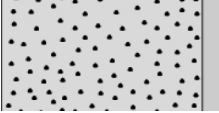
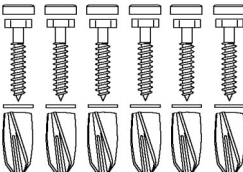
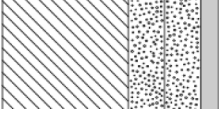
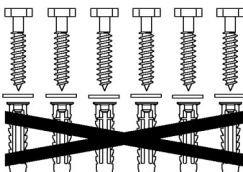


Product	CT 4100 vårdbrits, elektrisk uppfällbar, elektrisk höjreglerbart
Varunummer	R8585572000
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.
Överensstämmelses deklARATION	Denne produkt är tillverkad i enlighet med: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter - Maskindirektivet 2006/42/EEG - RoHS-direktivet 2011/65/EU.









Product	CT 4100 vårdbrits, elektrisk uppfällbar, elektrisk höjdreglerbart
Varunummer	R8585572000

Montage i olika väggtyper

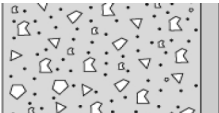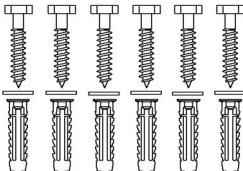	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	

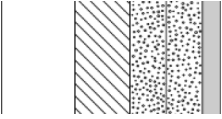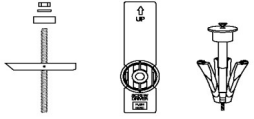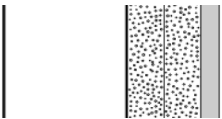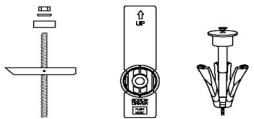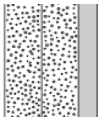

Product Varunummer	CT 4100 vårdbrits, elektrisk uppfällbar, elektrisk höjdreglerbart R8585572000
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.