



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS handgreep 600 mm RT102108
Kleur	VVS: 777565308 NRF: 6317166 EAN: 5708590153964 HMI: 19083 NBS: N13:436 FDA: ILS/D135866 Donkerblauw (RAL 5011)
Beschrijving	PLUS toiletsteunen zijn hoogwaardige producten en kunnen op talloze manieren worden gecombineerd. De Plus toiletsteunen bieden de finishing touch voor het inrichten van een functionele en flexibele badkamer. Een betrouwbare oplossing met veel verschillende opties, welke eenvoudig de basis kan leggen voor meer onafhankelijkheid. PLUS handgreep, diameter 33 mm, lengte 600 mm, voor vaste montage. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de handgreep vast te houden. Inkl. muur rozet, die de bevestigingen bedekt. Materiaal: Gepoedercoat aluminium en kunststof. Excl. bevestigingsmateriaal.
Product capaciteit	Maximale belasting: 235 kg. Wanneer de handgreep wordt belast met 235 kg, wordt elke wandbevestiging belast met 56 kg. <i>Handgrepen worden getest met een 1,5 veiligheidsfactor in overeenstemming met de eisen in ISO 17966:2016.</i>
Materialen	Basic material: Aluminium Surface material: Polyester lacquer Cover cap: Cyclopy plastic
Ergonomy	Door de diameter van 33 mm kan de handgreep comfortabel en stevig worden vastgehouden. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de handgreep vast te houden.



Product	PLUS handgreep 600 mm
Artikelnummer	RT102108
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.



PRESSALIT®

Product	PLUS handgreep 600 mm
Artikelnummer	RT102108

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8616 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8616 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8616 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8666 - Bevestigingsmateriaal, 8 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6 Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8616 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS handgreep 600 mm RT102108		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.		

pressalit.com