


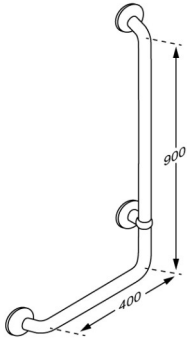

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS 90° vinkel stödhandtag 400 x 900 mm RT118035
<b>Färg</b>	VVS:777567635 NRF:6317176 EAN:5708590146300 HMI: 25433 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Röd (RAL 3003) 
<b>Beskrivning</b>	<p>PLUS stödhandtag är produkter av hög kvalitet, som kan kombineras på en mängd olika sätt och fullände inredningen idet funktionella och praktiska badrummet. En stabil lösning med stödhandtag och ett otal kombinationsmöjligheter kan hjälpa brukaren att klara sig bättre på egen hand.</p> <p>PLUS stödhandtag, vinkel 90°, höger, diameter 33 mm, A:400 mm x B:900 mm, för fast montering. Avståndet på 50 mm från vägg till stödhandtag på ett monterat stödhandtag gör det enkelt att greppa handtaget. Inkl. väggrosett, som gömmer monteringskruvarna. Material: Pulverlackerat aluminium och plastmaterial. Exkl. monteringskruv för vägg.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Max belastning: 235 kg. När stödhandtaget belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 56 kg. <i>Stödhandtag testas med säkerhetsfaktor 1,5 i enlighet med kraven i SS/ISO 17966:2016.</i>
<b>Material</b> <b>Ergonomi</b>	Pulverlackerad aluminium. Väggrosett: Cycoloy-plast. Strop: Nylon (PA).  Handtagets diameter är 33 mm. Handtaget ligger därför bra i handen och möjliggör ett stadigt grepp.  Ett monterat handtag håller ett avstånd på 50 mm från väggen. Avståndet gör det lätt att greppa handtaget.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.





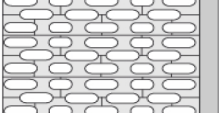

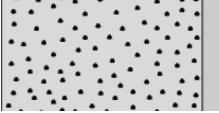

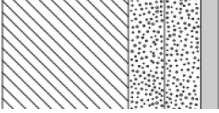



<b>Product</b>	PLUS 90° vinkel stödhandtag 400 x 900 mm
<b>Varunummer</b>	RT118035
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbelaggen kan uppstå.</p> <p><b>Link til eBVD:</b> <a href="https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/3449/0/Pdf">https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/3449/0/Pdf</a></p> <p>Denna produkt har fått följande bedömning: Byggvarubedömningen: Accepteras</p>



<b>Product</b>	PLUS 90° vinkel stödhandtag 400 x 900 mm
<b>Varunummer</b>	RT118035
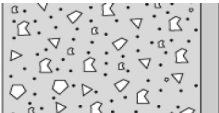
## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8667 - Monteringsset 12 st. M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS 90° vinkel stödhandtag 400 x 900 mm RT118035
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringskruv (12 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (12 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 