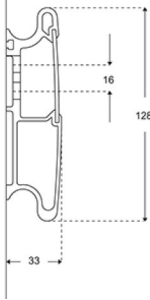




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS wandrail, 1800 mm R9818112	
Kleur	VVS:615841118 NRF:7501017 EAN:5708590305813 HMI: 71743 Antracietgrijs	
Beschrijving	PLUS wandrail wandrail wordt gebruikt voor het monteren van toiletsteunen, douchezittingen en muurframes voor wastafels en maakt het mogelijk om deze producten zijwaarts te verplaatsen. Zie hieronder een selectie van producten voor montage op de wandrails. PLUS wandrail, 1800mm voor horizontale montage. De wandrail wordt gebruikt voor het monteren van toiletsteunen, douchezittingen en muurframes voor wastafels, en maakt het mogelijk om deze producten zijwaarts te verplaatsen. Zie hieronder een selectie van producten voor montage op de wandrails. De afdekplaat verbergt bouten en kabels en vereenvoudigd de reiniging. Materialen: aluminium en polystyreen. Excl. bevestigingsmateriaal	
Verstelbaarheid	Vaste montage	
Product capaciteit	Maximale belasting: tot 1000 kg afhankelijk van het wandtype.	
Materialen	De wandrail is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De afdekplaat is gemaakt van polystyreen en de uiteinden van de rail zijn afgedekt met ABS-polymeer.	
Ergonomy	De rail verdeelt het gewicht van het individuele badkamer product, bijvoorbeeld een wastafel muurframe, over de gehele lengte. De producten kunnen worden afgesteld en vergrendeld op de rail met intuïtieve vergrendelingsfuncties.	
Funktie	De horizontale rail maakt het mogelijk om het product langs de muur te verplaatsen om de beschikbare ruimte in de badkamer constant te optimaliseren. De voorste afdekplaat verbergt montage bouten en eventuele kabels.	
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.	



PRESSALIT®

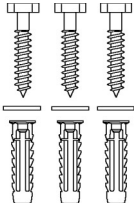
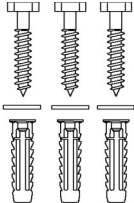
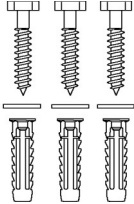
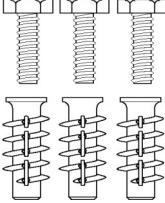
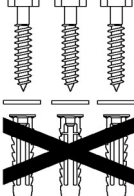
Product	PLUS wandrail, 1800 mm
Artikelnummer	R9818112
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.



PRESSALIT®

Product	PLUS wandrail, 1800 mm
Artikelnummer	R9818112

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8620 - Bevestigingsmateriaal, 3 schroeven Ø8 x 70 - pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8620 - Bevestigingsmateriaal, 3 schroeven Ø8 x 70 - pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=H12 V8620 - Bevestigingsmateriaal, 3 schroeven Ø8 x 70 - pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8670 - Bevestigingsmateriaal, 3 bouten M8 x 35, pluggen FTP M8. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8620 - Bevestigingsmateriaal, 3 schroeven Ø8 x 70 - pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product	PLUS wandrail, 1800 mm
Artikelnummer	R9818112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

30. juli 2026