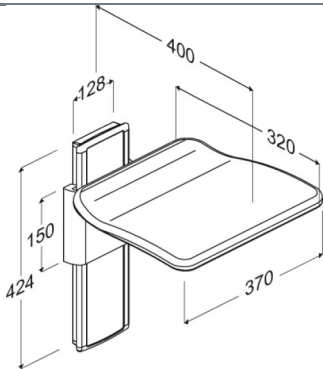




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur manuellement R5520112000
Couleur	VVS:777531200 NRF:7501003 RSK:7973927 EAN:5708590306360 HMI: 130158 NBS:N13:448 FDA:INN/D135865 Blanc
Description	 <p>PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur de 240 mm. Façade glissière-support verticale gris anthracite. Le siège est rabattable. Livré sans vis de montage. Les strapontins ne sont pas pour usage dans la zone de douche.</p> <p>PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur de 240 mm, façade glissière-support verticale gris anthracite. Matériaux : aluminium, résine thermodurcissable, matière synthétique. Livré sans vis de montage.</p>
Réglage Hauteur de réglage Capacité du produit	Réglable en hauteur 240 mm Poids maximum de l'utilisateur : 265 kg. Lorsque le siège est chargé de 265 kg, chaque vis de montage est chargé de 23 kg. <i>Les PLUS strapontin rabattable ont été testé statiquement avec un facteur de sécurité de 1,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.</i>
Matériaux Fonctions	<p>Le strapontin est fait en résine thermodurcissable et en aluminium anodisé 10 microns. Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable.</p> <p>Le strapontin rabattable, avec son siège ergonomique, est idéal quand on a besoin d'une place assise supplémentaire dans un espace réduit. Il s'agit typiquement de pièces où l'on peut avoir besoin de se reposer, par exemple la cuisine, l'ascenseur, un long couloir ou le coin habillage/déshabillage de la salle de bains.</p>



PRESSALIT®

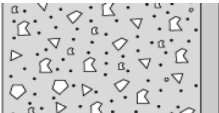
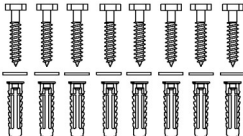

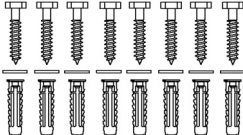
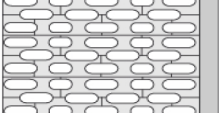
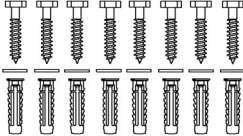
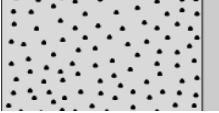
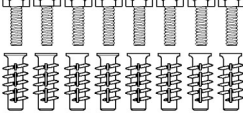
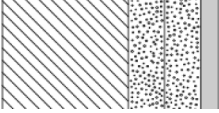
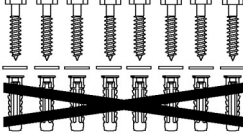
Article	PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur manuellement
Numéro article	R5520112000
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70%</p> <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>



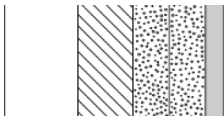
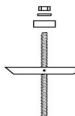

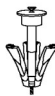
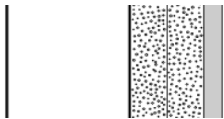
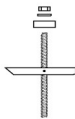

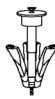
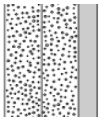
PRESSALIT®

Article	PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur manuellement
Numéro article	R5520112000

Installation dans de différents types de mur

	<p>Béton >B25</p> <p>V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.</p> 
	<p>Brique pleine >= Mz12</p> <p>V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.</p> 
	<p>Parpaing plein >= Hlz12</p> <p>V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.</p> 
	<p>Béton cellulaire P4</p> <p>V8660 - Kit vis de montage, 8 boulons fraisés M8 x 35, chevilles FTP M 8. Doit être commandé séparément.</p> 
	<p>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois</p> <p>V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.</p> 



Article Numéro article	PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur manuellement R5520112000		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (8 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (8 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Vis de montage (8 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	