




Produkt Produktnummer	SELECT TL3 Toilet-Lifter, Elektrisch, für Bodenablauf R9113112
Farbe	Anthrazitgrau
Produktbeschreibung	<p>VVS:617989612 NRF:6191187 EAN:5708590372723 HMI: 138228</p>  <p>SELECT Toilettenlifte sind in verschiedenen Modellen und Farben sowohl für den Wand- als auch für den Bodenablauf erhältlich. Es gibt sie in elektrisch oder manuell höhenverstellbarer Ausführung, mit oder ohne Seitenprofil und für Standard-WC-Becken und Dusch-WCs. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf Hygiene und leichte Reinigung gelegt.</p> <p>SELECT TL3 WC-Lifter, für Bodenablauf. Inkl. eingebauter Spülkasten mit Doppelspülung 3/6 Liter (kann auf 2/4 Liter eingestellt werden). Um 200 mm elektrisch höhenverstellbar mit integriertem Bedienelement am Stützklappgriff. WC-Keramik, Toilettensitz und Stützklappgriffe (für der Höhenverstellung notwendig) müssen separat bestellt werden. Materialien: Edelstahl und PMMA / ABS-Kunststoff. Ekskl. Wandbefestigungen.</p>
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	200 mm
Produktkapazität	<p>Maximales Anwendergewicht: 200 kg. Maximale Belastung: 235 kg (Anwender + Zubehör). Bei einer Belastung des WC-Lifters mit 235 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 65 kg belastet. <i>Der WC-Lifter wurde statisch mit einer Belastung von 600 kg, an der Montagestelle der Toilette, getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen. Bitte beachten Sie, dass die meisten Toiletten, die am WC-Lifter montiert werden können, auf 400 kg getestet wurden.</i></p>
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindigkeit aufwärts: 10 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 10 mm/s
Geräusch	48 dB

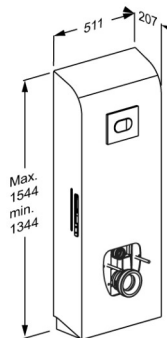

Produkt	SELECT TL3 Toilet-Lifter, Elektrisch, für Bodenablauf
Produktnummer	R9113112
Materialien	Der Toilet-Lifter besteht aus Edelstahl, die Abdeckverkleidung aus PMMA / ABS-Kunststoff
Stromanschluss (V)	230
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 70 W Stromverbrauch, standby: 2 W
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>






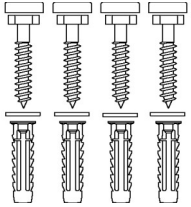
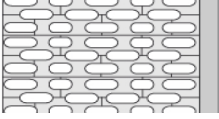
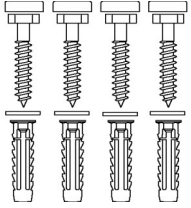
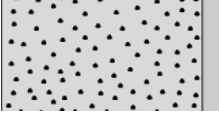
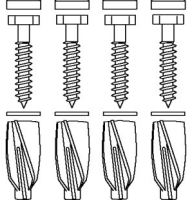
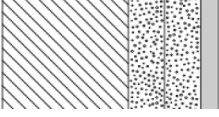
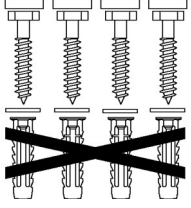
PRESSALIT®

Produkt	SELECT TL3 Toilet-Lifter, Elektrisch, für Bodenablauf
Produktnummer	R9113112
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.








Produkt	SELECT TL3 Toilet-Lifter, Elektrisch, für Bodenablauf
Produktnummer	R9113112

Montage in verschiedenen Wandtypen

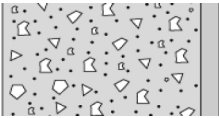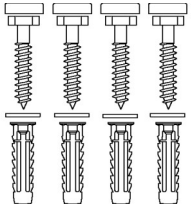	Beton >B25 V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8655 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit weisse Abdeckung. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	

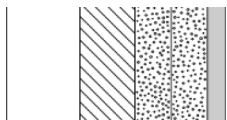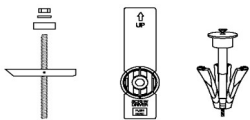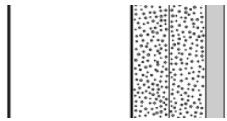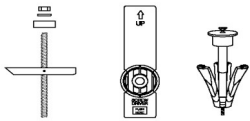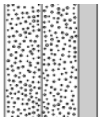

Produkt Produktnummer	SELECT TL3 Toilet-Lifter, Elektrisch, für Bodenablauf R9113112	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	