




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS duschsits 450 med hål, manuellt höjd- och sido reglerbar R7455000
<b>Färg</b>	VVS: 777516400 NRF: 6317135 EAN: 5708590359946 HMI: 124242 FDA: INN/D135865 Vit
<b>Beskrivning</b>	 <p>PLUS duschstolar erbjuds i flera färger. De finns både som fasta, elektriskt justerbara och manuellt justerbara, med och utan hål, och med möjlighet till rygg och armstöd. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor.</p> <p>PLUS duschsits 450 med hål, uppfällbart, med ryggstöd. Höjdregerbart 380 mm och sidoregerbart, utan användning av verktyg. Antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Mjuk och skön PUR-skum med träkärna, monterade på aluminiumprofil. Till eftermontering på existerande vågrät PLUS väggskena (medföljer ej). <i>Ersätter R7441</i></p>
<b>Justerbar</b> <b>Höjjustering</b> <b>Produktkapacitet</b>	Höjd- och sidoregerbar 380 mm Max brukarvikt: 200 kg När duschsitsan belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 23 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statistiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
<b>Material</b> <b>Ergonomi</b> <b>Funktioner</b>	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS. Ergonomisk sits - säte 450 x 437 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Sits kan fällas upp mot väggen efter användning.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

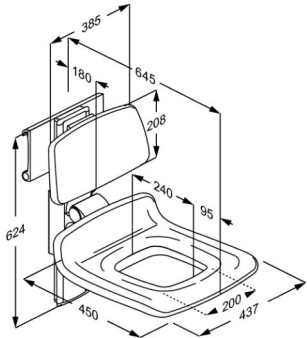

<b>Product</b>	PLUS duschsits 450 med hål, manuellt höjd- och sido reglerbar
<b>Varunummer</b>	R7455000
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b>Erisan OXY+ Tvättspirit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> <p>Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.</p>
<b>Överensstämmelses deklaration</b>	