

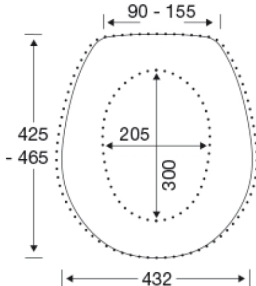
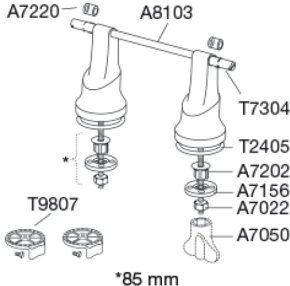
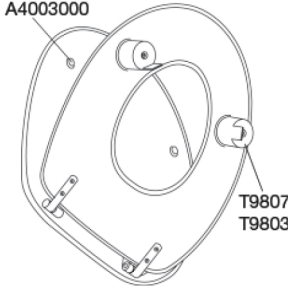
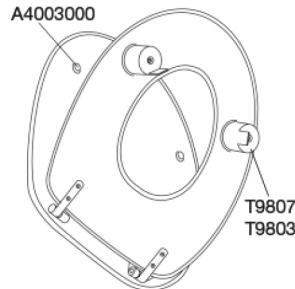


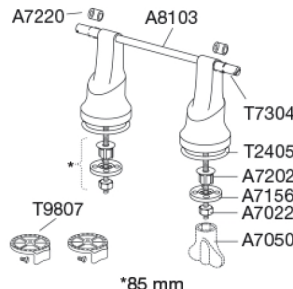

PRESSALIT®

Toiletzitting Ergosit met deksel, 50 mm verhoogd Met stabilisatie buffers en voorzien van speciale scharnieren aan de verhoogde toiletzitting

Artikelnummer	R20000 VVS: 615691000 NRF: 6190519 EAN: 5708590094779 HMI: 12501 NBS: N13:300 Toiletzitting Ergosit, met stabilisatie buffers, met deksel, verhoogd 50 mm. Met verhoogd doorlopende scharnierpen	
Kleur	Wit	
Kenmerken	Toiletzitting Ergosit, met stabilisatie buffers, met deksel, verhoogd 50 mm. Met verhoogd scharnier met doorlopende pen	
	  	
Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydhar, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Scharnieren: Roestvast staal en thermoplast.	
Product capaciteit	Dit product is statisch getest tot 375 kg. Aangezien de Europese norm voor technische hulpmiddelen voor gehandicapten, BS/EN 12182:2012, een statische test met veiligheidsfactor 1,5 vereist, is de nominale maximum belasting voor dit product dus 250 kg	
Gewicht	3,5 kg	
Gewicht per stuk	3,8 kg	

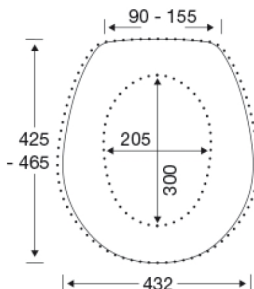



Toiletzitting Ergosit met deksel, 50 mm verhoogd
Met stabilisatie buffers en voorzien van speciale scharnieren aan
de verhoogde toiletzitting

Gewicht per colli	0 kg
Aantal per colli	0
Aantal per pallet	0
Reiniging	Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting schoon te maken. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Voor het desinfecteren van de zitting, b.v. ethanol 85% kan worden gebruikt. Zorg ervoor dat het product wordt afgeveegd met een zachte doek die is uitgewrongen in schoon water en onmiddellijk na desinfectie wordt afgedroogd met een zachte, droge doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of chloorhoudende stoffen. reinigingsmiddelen op basis van, omdat deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeft kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.
Garantie	Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.