


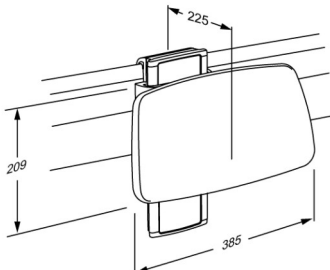

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS ryglæn, højde- og sideværts regulérbart R6444108
<b>Farve</b>	NRF:6317052 EAN:5708590365534 HMI: 124205 FDA:INN/D135865  Mørkeblå (RAL 5011)
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>PLUS ryglæn fås i flere farver og versioner, de fås både som fastmonterede og regulérbare. De er velegnede til brug bag et væghængt toilet uden cisterne eller til montering på en af Pressalits toiletløftere.</p> <p>PLUS ryglæn, 385 x 209 mm, polstret. Højderegulérbart 150 mm samt sideværts regulérbart, til montering på vandret vægskinne bag et væghængt toilet uden cisterne. Aftageligt uden brug af værktøj og let at sætte på igen, når der er brug for det. Materialer: Aluminium og blødt purskum med trækerne. Til eftermontering på vandret PLUS vægskinne (medfølger ikke).</p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Reguleringshøjde</b> <b>Produktkapacitet</b>	Højde- og sideværts regulérbar 150 mm  Maksimal belastning: 50 kg. Maksimal brugervægt: 100 kg. Når ryglænet belastes med 50 kg, belastes hver vægmonteringssskrue med 33 kg. <i>Ryglæn skal kunne bære vægten af en person der støtter sig til det.</i> <b>Ryglæn er ikke personbærende</b> , og de testmetoder der er foreskrevet for ryglæn afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at ryglæn testes statisk med 50% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et ryglæn er 50 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 100 kg støtter sig til ryglænet.
<b>Materialer</b> <b>Funktioner</b>	Ryglænet er fremstillet i PUR-skum og er overtrukket med en klar overfladelak i PUR. Til toilet uden cisterne
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



<b>Produkt</b>	PLUS ryglæn, højde- og sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R6444108
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>