


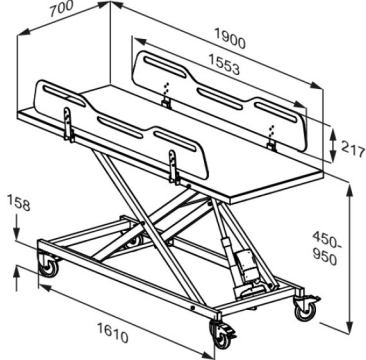

<b>Produkt</b>	MCT 3 mobile Ankleideliege, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R9632719000
	VVS: 777542330 RSK: 8565089 EAN: 5708590389936 HMI: 139819
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Produktbeschreibung</b>	 <p>Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen</p> <p>Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist. Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer.</p> <p>MCT 3 mobile Ankleideliege, 700 x 1900 mm, zwei umklappbare Seiten. Elektrisch höhenverstellbar mit Kabelfernbedienung. 500 mm Hubbereich von 450 bis 950 mm. Matratze muss separat bestellt werden. Hinweis: Der MCT 3 muss an das Stromnetz angeschlossen sein, um die Höhenverstellfunktion nutzen zu können.</p>
<b>Verstellung</b>	Höhenverstellbar
<b>Höhenverstellung</b>	500 mm
<b>Produktkapazität</b>	Maximales Anwendergewicht (MUM): 200 kg. Maximale Belastung (SWL): 205 kg. <i>Die Pflegeliege ist mit 512,5 kg statisch getestet, gemäß den Anforderungen der Norm IEC 60601-1, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 2,5 erfordert.</i>



<b>Produkt</b>	MCT 3 mobile Ankleideliege, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R9632719000
<b>Aufwärtsgeschwindigkeit</b>	Geschwindigkeit aufwärts: 17 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 17 mm/s
<b>Geräusch</b>	50 dB
<b>Materialien</b>	Materialien: Kunststoff, Compact Density Fiberboards (CDF) und lackierter stahl.
<b>Ergonomie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die ergonomisch geformten Seitengitter der mobilen Ankleideliege haben ein praktisches niedriges Mittelstück, welches dem Pflegepersonal einen besseren Zugang und eine bessere Arbeitsumgebung bietet, während die zu pflegende Person auf den Duschwagen versetzt, gewechselt und angezogen werden kann.</li><li>• Durch die einhändig bedienbaren Seitengitter kann der Betreuer während des gesamten Vorgangs sowohl Augenkontakt als auch physischen Kontakt mit dem Benutzer aufrechterhalten. Die klappbaren Seitengitter bieten einen einfachen Zugang von allen vier Seiten des Duschwagens.</li><li>• Die verschiedenen Griffmöglichkeiten am Seitengitter ermöglichen es dem Benutzer sich beim Wenden daran festzuhalten. Das gibt dem Benutzer Sicherheit und fördert das Wohlbefinden und die Selbständigkeit bei der Pflege im Duschwagen.</li><li>• Die leicht zu reinigenden, glatten Kontaktflächen verhindern, dass sich Schmutz ablagert und Bakterien ansammeln.</li></ul>
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Ankleideliege kann für einen einfachen Transport und mehrere Benutzer von Raum zu Raum bewegt werden.</li><li>• Intuitive, benutzerfreundliche Dropdown-Seitengitter mit einhändiger Bedienmöglichkeit.</li></ul>
<b>Stromanschluss (V)</b>	230
<b>Motor</b>	LA40 (Linak) IPX6
<b>Steuerkasten</b>	CA30 (Linak) IPX6
<b>Kabelgebundener Fernbedienung</b>	HB30 (Linak) IPX6
<b>Stromverbrauch (max. Belastung)</b>	Stromverbrauch, maximal Belastung: 280 W Stromverbrauch, standby: 0,5 W
<b>Garantie</b>	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.



<b>Produkt</b>	MCT 3 mobile Ankleideliege, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R9632719000
<b>Reinigung</b>	<p>Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch, das in eine milde Seifenlauge, wie z. B. Universalreiniger, getaucht und dann ausgewrungen wurde. Nach der Reinigung muss das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch abgewischt werden. Dieser Schritt ist wichtig, um die Materialien vor Verfärbungen zu schützen. Außerdem schützt dies vor einer möglichen Zersetzung der Oberflächenlackierung.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>
<b>WEEE</b>	<p>Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.</p>



PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	MCT 3 mobile Ankleideliege, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R9632719000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®