




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	MCT 5 mobil vårdbrits, manuell höjdglerbar R9502721000
<b>Färg</b>	Vit
<b>Beskrivning</b>	<p>VVS: 777542530 EAN: 5708590389882 HMI: 147816 FDA: INW/D546021</p>  <p>Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdglerbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn.</p> <p>Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra.</p> <p>Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren.</p> <p>MCT 5 mobilt vårdbrits, 700 x 1900 mm, två nedfällbara sidor. Manuellt höjdglerbar med fodpedal (hydraulisk). 500 mm höjdglering från 550 till 1050 mm. Madrass måste beställas separat.</p>
<b>Justerbar</b>	Höjdglerbar
<b>Höjdglering</b>	500 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Max brukarvikt (MUM): 200 kg Max belastning (SWL): 205 kg. <i>Britsen har testats statiskt med 307,5 kg, enligt kraven i ISO 17966 standarden som kräver testning med säkerhetsfaktor 1,5.</i>
<b>Material</b>	Plastmaterial, Compact Density Fiberboards (CDF) och lackerat stål.

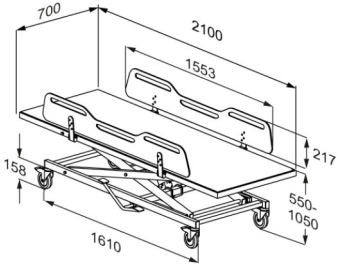

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	MCT 5 mobil vårdbrits, manuell höjreglerbar R9502721000
<b>Ergonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De ergonomiskt utformade sänggrindarna har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av -och påklädning av brukare.</li><li>• Enhandsgreppet för hantering av sänggrindarna gör det möjligt för vårdgivaren att hålla ögonkontakt och fysisk kontakt med brukaren under hela processen. De nedfällbara sänggrindarna ger också enkel åtkomst från alla fyra sidor av duschvårdbritsen.</li><li>• De utskurna handtagen i sänggrindarna gör det möjligt för brukaren att själv hjälpa till när den ska vändas, vilket motiverar fysisk träning.</li><li>• Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier.</li></ul>
<b>Funktioner</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Den mobila vård britsen kan enkelt flyttas från rum till rum och används av flera användare. • Enkelt handhavande ger användarvänlighet, har nedfällbara sänggrindar och trådbunden manöverdosa.</li></ul>
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.



<b>Product</b>	MCT 5 mobil vårdbrits, manuell höjdglerbar
<b>Varunummer</b>	R9502721000
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med en fuktig trasa som vridits ur efter att ha doppats i en mild tvålblandning, t.ex. en universal rengöringslösning. Efter rengöringen är det viktigt att torka av produkten med en torr, mjuk trasa. Detta steg är mycket viktigt för att förhindra att materialet missfärgas. Dessutom hjälper det till att förhindra att ytans färg försämras.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>