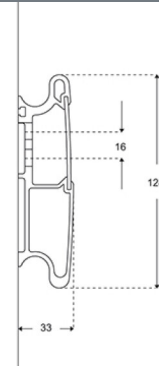




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS vægskinne, 600 mm R9806112
<b>Farve</b>	Antracitgrå
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS:615841106 NRF:7501013 EAN:5708590305738 HMI: 71739</p> <p>PLUS vægskinner anvendes til ophængning af toiletstøtter, brusesæder og vaskophæng, og muliggør sideværts regulering af disse produkter. Et udvalg af produkter, som kan påsættes skinnen, vises herunder.</p> <p>PLUS vægskinne, 600 mm, til vandret montering. Afdækningspladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger og sikrer nem rengøring. Materiale: Aluminium og polystyren. Ekskl. monteringskruger til væg.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Fastmonteret
<b>Produktkapacitet</b>	Maksimal belastning: Op til 1000 kg, afhængig af væggens beskaffenhed.
<b>Materialer</b>	Vægskinnen er primært fremstillet af 10 my anodiseret aluminium. Afdækningspladen er kunststof og endeadækningerne er ABS.
<b>Ergonomi</b>	Den vandrette vægskinne gør indretningen fleksibel. Gennem produkternes forflytbarhed opnås optimale betingelser både for brugeren og hjælperen, og rummet udnyttes perfekt.
<b>Funktioner</b>	Skinnen fordeler vægten af det enkelte badeværelsesprodukt over hele skinnens længde. Produkterne kan fastlåses til skinne med intuitive justerings- og låsefunktioner. Frontpladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



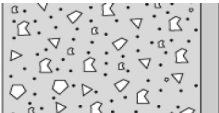
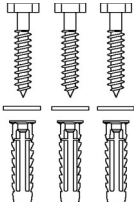

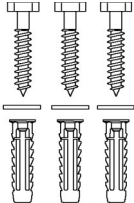
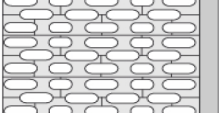
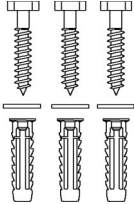
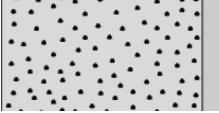
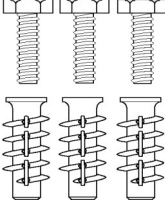
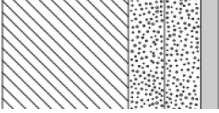
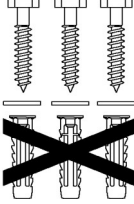


<b>Produkt</b>	PLUS vægskinne, 600 mm
<b>Varenummer</b>	R9806112
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>



<b>Produkt</b>	PLUS vægskinne, 600 mm
<b>Varenummer</b>	R9806112

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8620 - Monteringssæt, 3 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8620 - Monteringssæt, 3 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= H1z12</b> V8620 - Monteringssæt, 3 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8670 - Monteringssæt, 3 stk bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8620 - Monteringssæt, 6 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS vægskinne, 600 mm
<b>Varenummer</b>	R9806112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®