


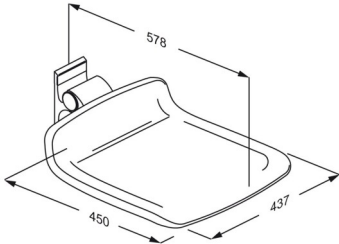

# PRESSALIT®

|  |   |
|--|---|
| <b>Article</b><br><b>Numéro article</b>                  | PLUS siège de douche 450, montage fixe<br>R7404108  |
| <b>Couleur</b>   | NRF:6317103<br>EAN:5708590359496<br>HMI: 124480<br>FDA:INN/D135865<br><br>Bleu foncé (RAL 5011)   |
| <b>Description</b>                                       |  <p>PLUS sièges de douche sont disponibles en différentes couleurs. Il y a l'option d'hauteur fixe, réglage électriquement ou réglage manuellement, assise évidée ou pas et avec ou sans dossier et accoudoirs.<br/>Ils peuvent être montés sur le mur ou sur PLUS glissière-supports de Pressalit.</p> <p>PLUS siège de douche 450, rabattable. Pour montage fixe.<br/>Matériaux : mousse de polyuréthane douce et confortable avec noyau en bois monté sur un profilé aluminium.<br/>Livré sans vis de montage.</p>                              |
| <b>Réglage</b><br><b>Capacité du produit</b>             | Montage fixe<br><br>Poids maximum de l'utilisateur : 200 kg.<br>Lorsque le siège est chargé de 200 kg, chaque vis de montage est chargé de 113 kg.<br><br><i>Les PLUS sièges de douche ont été testé statiquement avec un facteur de sécurité de 1,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.</i>   |
| <b>Matériaux</b><br><b>Ergonomie</b><br><b>Fonctions</b> | L'assise et le dossier sont principalement faits de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et moulée autour d'une armature en contreplaqué de marine et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent. Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable.<br><br>Siège ergonomique – surface d'assise 450 x 437 mm. Rabattable, le siège permet de dégager de l'espace supplémentaire au sol, si nécessaire.<br><br>Le siège est fabriqué dans un matériau doux et antidérapant qui n'est jamais froid au toucher tout en offrant un bon confort d'assise. |
| <b>Garantie</b>  | Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.  |




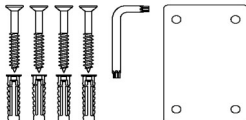
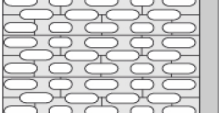
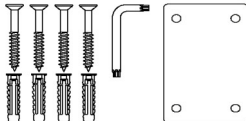
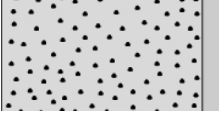
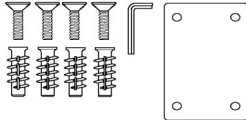
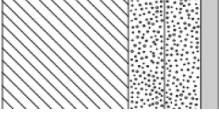
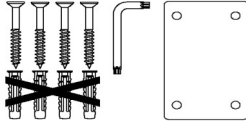


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Article</b>                   | PLUS siège de douche 450, montage fixe  |
| <b>Numéro article</b>            | R7404108  |
| <b>Nettoyage</b>                 | <p>Employez de la simple eau savonneuse.<br/>Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b><br/>Erisan OXY+<br/>Tvättsprit 70%<br/>CaviCide surface désinfectant decontaminant cleaner<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Terralin protect (SCHÜLKE+)<br/>Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</b><br/>Wetrok Caledor (Wetrok)<br/>Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Important : surfaces polyuréthanes sur les sièges de douche PLUS et dossier PLUS contiennent un revêtement antibactérien, qui risque d'être détruit si un nettoyant autre que du savon et de l'eau est utilisé pour le nettoyage.</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p><b>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM :</b><br/>Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p> |
| <b>Déclaration de conformité</b> | Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.  |









|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Article</b>        | PLUS siège de douche 450, montage fixe |
| <b>Numéro article</b> | R7404108                               |

## Installation dans de différents types de mur
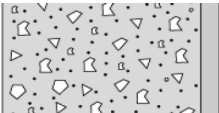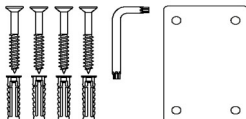
|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <b>Béton &gt;B25</b><br>V8604 - Kit vis de montage, 4 vis fraisées Ø8 x 70, chevilles SX10.<br>Doit être commandé séparément.   |    |
|   | <b>Brique pleine &gt;= Mz12</b><br>V8604 - Kit vis de montage, 4 vis fraisées Ø8 x 70, chevilles SX10.<br>Doit être commandé séparément.  |   |
|  | <b>Parpaing plein &gt;= Hlz12</b><br>V8604 - Kit vis de montage, 4 vis fraisées Ø8 x 70, chevilles SX10.<br>Doit être commandé séparément.  |  |
|  | <b>Béton cellulaire P4</b><br>V8654 - Kit vis de montage, 4 boulons fraisés M8 x 35, chevilles FTP M 8.<br>Doit être commandé séparément.   |  |
|  | <b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois</b><br>V8604 - Kit vis de montage, 4 vis fraisées Ø8 x 70, chevilles SX10. N'utilisez pas les chevilles.<br>Doit être commandé séparément. |  |

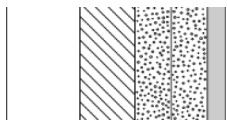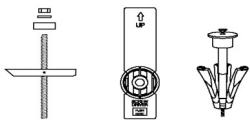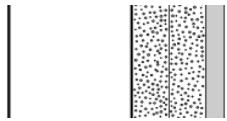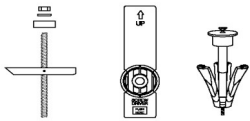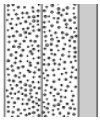

|   |   |
|---|---|
| <b>Article</b><br><b>Numéro article</b>   | PLUS siège de douche 450, montage fixe<br>R7404108  |
|    | <b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm</b><br>Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.<br> |
|    | <b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm</b><br>Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.<br>          |
|  | <b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable</b><br>Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.<br>  |

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.