




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart R7664000
Farve	VVS: 777517400 NRF: 6317153 EAN: 5708590360263 HMI: 124227 Hvid
Produktbeskrivelse	 <p>PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulerbare og manuelt regulerbare, med og uden hul, samt med tilvalg af ryg- og armlæn.</p> <p>De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>Eldrebet PLUS brusesæde 450, med ryg- og armlæn. Elektrisk højderegulérbart 500 mm og manuelt sideværts regulérbart, armlæn kan højdereguleres manuelt uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklappelige.</p> <p>Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeflader i termoplastisk elastomér er slidstærke og rengøringsvenlige.</p> <p>Til eftermontering på vandret PLUS vægskinne (medfølger ikke).</p>
Justerbarhed	Højde- og sideværts regulérbar
Reguleringshøjde	500 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt (sæde): 150 kg. Maksimal belastning for armlæn er 55 kg. Når sædet belastes med 150 kg, belastes hver monteringskrue med 35 kg.
Hastighed opad	Hastighed op: 10 mm/s Hastighed ned: 10 mm/s
Støjniveau	48 dB

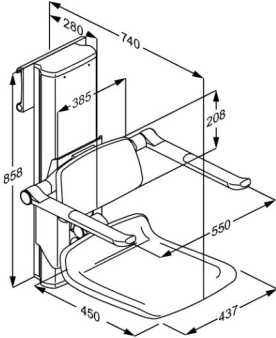

Produkt	PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart
Varenummer	R7664000
Materialer	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.
Ergonomi	Ergonomisk designet sæde - siddeflade 450 x 437 mm. Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort. Den ovale form på armlænene gør dem nemme og behagelige at holde ved, og støtte sig til.
Funktioner	Sæde, ryglæn og armlæn kan justeres samtidigt takket være et sikkert og let klikssystem. Armlænene kan også justeres uafhængigt af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn kan foldes sammen når de ikke er i brug. Med elektrisk betjening er det muligt for hjælperen at indstille sædet til en god arbejdshøjde, mens brugeren sidder på sædet. Håndbetjeningen leveres med beslag til montering på væggen.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40 (Linak) 6000N, IPX6
Styreboks	SMPS14 (Linak) IPX6
Håndbetjening	HB3 (Linak) IP66
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 60 W Strømforbrug, standby: 0,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart
Varenummer	R7664000
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Erisan OXY+ Tvåttspirit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart
Varenummer	R7664000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®