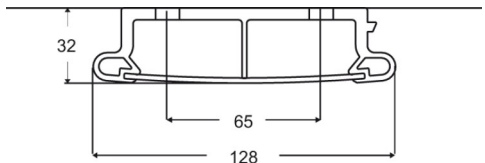




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS wandrail, gegroefd, 210 mm. Voor rechts bedienbare toiletsteunen. R9862112
Kleur	VVS:615842102 EAN:5708590352299 Antracietgrijs 
Beschrijving	PLUS Wandrail, gegroefd, voor verticale montage, 210 mm. Ten behoeve van in hoogte verstelbaar, rechts bedienbare toiletsteun. Hieronder ziet u een selectie van producten die passen op deze wandrail. De afdekplaat bedekt bevestigingsbouten en kabels, en vereenvoudigt de reiniging. Exclusief bevestigingsset. Zie technische handleiding (Downloads) voor informatie over bevestigingsmogelijkheden voor verschillende wandtypen. PLUS Wandrail, gegroefd, voor verticale montage, 210 mm. Ten behoeve van in hoogte verstelbaar, rechts bedienbare toiletsteun. De afdekplaat bedekt bevestigingsbouten en kabels, en vereenvoudigt de reiniging. Materialen: Aluminium en polysyreen. Exclusief bevestigingsset.
Verstelbaarheid	Vaste montage
Materialen	De wandrail is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De afdekplaat is gemaakt van polystyreen en de uiteinden van de rail zijn afgedekt met ABS-polymeer.
Ergonomy	De verticale wandrail maakt hoogteverstelling van de verschillende producten mogelijk. In combinatie met het horizontale wandrail kan de beschikbare ruimte in de badkamer optimaal worden benut. In omgevingen met meerdere gebruikers maakt de verticale wandrail het mogelijk om de verschillende producten aan te passen naar de hoogte voor de individuele gebruiker.
Functie	De afdekplaat bedekt bevestigingsbouten en eventuele kabels.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.



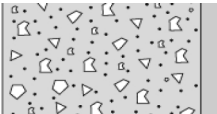
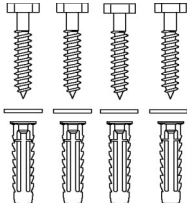
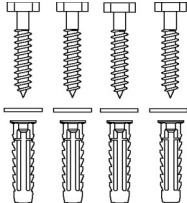
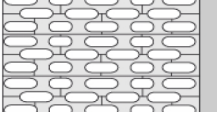
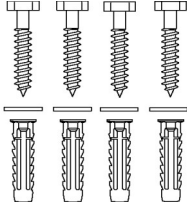
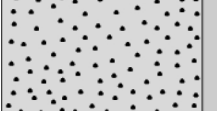
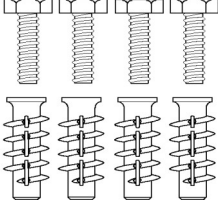
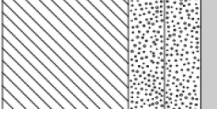
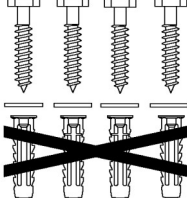
PRESSALIT®

Product	PLUS wandrail, gegroefd, 210 mm. Voor rechts bedienbare toiletsteunen.
Artikelnummer	R9862112
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.

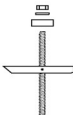
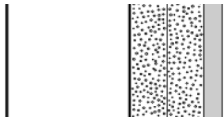
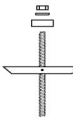
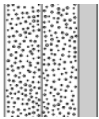


Product	PLUS wandrail, gegroefd, 210 mm. Voor rechts bedienbare toiletsteunen.
Artikelnummer	R9862112

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8653 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M8 x 35, pluggen FTP M8. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	PLUS wandrail, gegroefd, 210 mm. Voor rechts bedienbare toiletsteunen. R9862112
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.