




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS klapsæde, manuelt højderegulérbart R5500000
Farve	VVS: 777531700 NRF: 7501062 EAN: 5708590328218 HMI: 130162 FDA: INN/D135865 Hvid
Produktbeskrivelse	 <p>PLUS klapsæde. Manuelt højderegulérbart 240 mm uden brug af værktøj. Sædet er opklappeligt. Til eftermontering på lodret PLUS vægskinne (medfølger ikke). Klupsædet bør ikke anvendes i bruseområdet.</p> <p>PLUS klapsæde. Manuelt højderegulérbart 240 mm uden brug af værktøj. Materialer: Aluminium, hærdeplast og kunststof. Til eftermontering på lodret vægskinne (medfølger ikke).</p>
Justerbarhed Reguleringshøjde	Højderegulérbar 240 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt: 265 kg. Når sædet belastes med 265 kg, belastes hver monteringskrue med 23 kg. <i>PLUS klapsæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

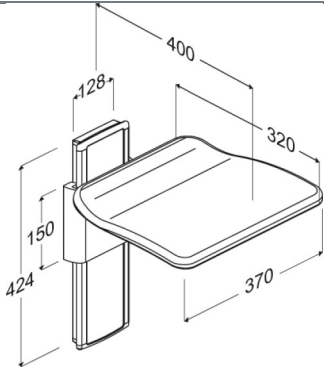

Produkt	PLUS klapsæde, manuelt højderegulérbart
Varenummer	R5500000
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>



PRESSALIT®

Produkt	PLUS klapsæde, manuelt højderegulerbart
Varenummer	R5500000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®