



<b>Produkt</b>	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R4580112
<b>VVS:</b>	654001510
<b>NRF:</b>	6132529
<b>RSK:</b>	7972588
<b>EAN:</b>	5708590309415
<b>HMI:</b>	71758
<b>NBS:</b>	N13:30,335
<b>FDA:</b>	ILW/D142473
<b>Farbe</b>	Anthrazitgrau
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>PLUS Waschtisch-Lifters sind in elektrisch, pneumatisch und manuell höhenverstellbaren Versionen erhältlich.</p> <p>Sie eignen sich zur Montage an der Wand oder zur Montage an Pressalit PLUS Wandschienen.</p> <p>PLUS Waschtisch-Lifter. Um 240 mm höhenverstellbar mithilfe eines Hebelns, seitlich verschiebbar. Empfehlung: Zu- und Ablaufsystem R2064/R2065/R2067. Anthrazitgraue Abdeckplatte auf Wandschiene.</p> <p>Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxschicht und ABS-Polymer. Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch, exkl. waagerechter PLUS Wandschiene.</p>
<b>Verstellung</b>	Höhen- und seitlich verstellbar
<b>Höhenverstellung</b>	240 mm
<b>Produktkapazität</b>	<p>Maximale Belastbarkeit: 135 kg.</p> <p>Geeignet für Waschtische von bis zu 22 kg.</p> <p>Bei einer Belastung mit 135 kg, trägt jede Befestigungsschraube 30 kg.</p> <p><i>Die Waschtisch-Lifter müssen in der Lage sein, das Gewicht des Waschtisches und das Gewicht der Person zu tragen, die den Waschtisch benutzt, um sich aus der sitzenden Position aufzurichten. Weder der Waschtisch noch der Waschtisch-Lifter sind zum Tragen einer Person bestimmt. Eine für den Waschtisch-Lifter geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung an der Vorderkante des Waschtisches bei 75% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 135 kg und das Gewicht des Waschtisches 22 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 151 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i></p>



<b>Produkt</b>	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R4580112
<b>Materialien</b>	Der Waschtisch-Lifter besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Die Abdeckung des Waschtisch-Lifters ist mit Endkappen aus ABS-Polymer versehen.
<b>Ergonomie</b>	Der Waschtisch-Lifter passt für alle Waschtischtypen mit Bolzenaufhängung. Das abgerundete und schlanke Design gestaltet die Reinigung einfach und unkompliziert.
<b>Funktionen</b>	Wenn die Höhe des Waschtisches nur gelegentlich verändert werden soll, kann ein manuell verstellbarer Waschtisch-Lifter die richtige Lösung sein. Wichtig: Nicht für die tägliche Höhenverstellung geeignet. Für Anwendung, die eine tägliche Höhenverstellung fordert, wird die Variante mit Gasdruckzylinder R4680 oder die elektrische Variante R478x empfohlen.
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



<b>Produkt</b>	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R4580112
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b> Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R4580112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®