


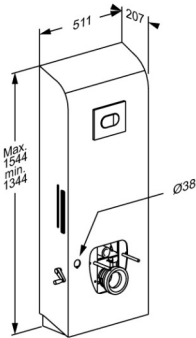

PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL4 upphängning till toalett, manuell, till golvavlopp R9014000
Färg	VVS:617989300 NRF:6191179 RSK:7828185 EAN:5708590372914 HMI: 138241 FDA:IKX/D319729 Vit
Beskrivning	 <p>SELECT elektrisk upphängning till toalett finns i flera modeller och färger för både väggavlopp och golvavlopp. De finns i elektriskt eller manuellt höjdjusterbara versioner, med eller utan sidoprofiler och för standardtoalettskålar och duschtoaletter. Allt utvecklat med fokus på hygien och enkel rengöring.</p> <p>SELECT TL4 upphängning till toalett, till golvavlop. Inkl. cistern med dubbelspolning 3/6 L (kan ställas om till 2/4 liter). Manuell höjddreglerbar 200 mm med handvevsmanövrering. Förberedd för douche-wc eller douche-wc-sits. Toalettskål, toalettsits och toalettarmstöd måste köpas separat. Material: Rostfritt stål och PMMA/ABS. Exkl. monteringskrav för vägg.</p>
Justerbar Höjdjustering	Höjddreglerbar 200 mm
Produktkapacitet	Max brukarvikt. 200 kg Max belastning. 235 kg (brukarvikt + tillbehör) När toalettlyftare belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 65 kg. <i>Toalettlyftaren testas statiskt med 600 kg, där toaletten fäster. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet. Observera att de flesta toaletter som kan monteras på lyftenheter, har testats till 400 kg.</i>
Material	Toalettlyftaren är tillverkad av rostfritt stål, med monteringskåpa i PMMA/ABS.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.




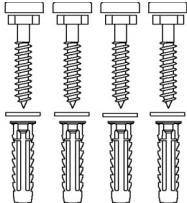
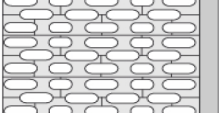
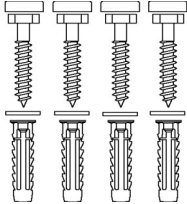
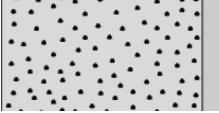
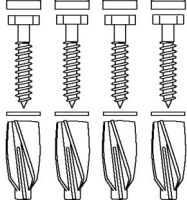
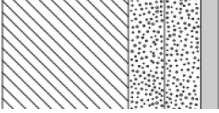
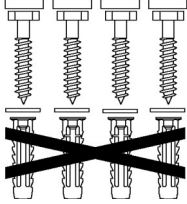


Product	SELECT TL4 upphängning till toalett, manuell, till golvavlopp
Varunummer	R9014000
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningsen kan uppstå.</p>




Product	SELECT TL4 upphängning till toalett, manuell, till golvvavlopp
Varunummer	R9014000

Montage i olika väggtyper

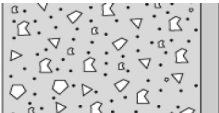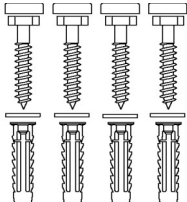	Betong >B25 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	

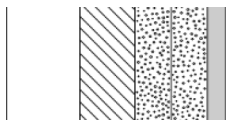

Product Varunummer	SELECT TL4 upphängning till toalett, manuell, till golvvavlopp R9014000
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 