




Produkt	VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze, Festmontage
Produktnummer	R1101000
Farbe	VVS:615722400 NRF:6191641 RSK:7828179 EAN:5708590176413 HMI: 25412 NBS:N13:436 DB: 2076621 FDA:ILS/D135866 Weiß
Produkt- beschreibung	 VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze, zur Festmontage, hochklappbar, Ausladung 850 mm, Höhe 850 mm. Das ergonomische Design sorgt für einen festen und angenehmen Halt sowie ein gutes Gefühl davon, wo die Stütze endet. Materialien: Rilsan-beschichteter Stahl, druckgegossenes Aluminium, Kunststoff. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden.
Verstellung	Festmontage
Produktkapazität	Maximale Belastung: 135 kg. Bei einer Belastung der Stützklappgriff mit 135 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 81 kg belastet.
Materialien	Hauptmaterial: Stahl Oberfläche: Rilsan Endkappen: Nylon (PA)
Ergonomie	Die Griffe bieten eine gute Hilfe beim Hinsetzen, Sitzen, Aufstehen und Stehen. Gute breite Stützflächen für Hände und Arme sowie die abgerundete Form geben einen sicheren Halt.

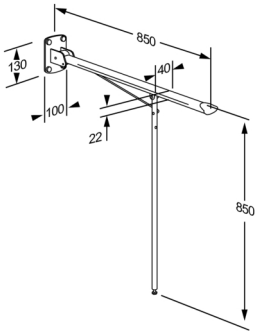

Produkt	VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze, Festmontage
Produktnummer	R1101000
Funktionen	Der Stützklappgriff kann hochgeklappt werden, um Platz zu schaffen. Mit Bodenstütze für besonderen Halt.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kilto Clean) NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.




PRESSALIT®

Produkt	VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze, Festmontage
Produktnummer	R1101000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	

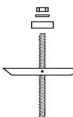

Produkt Produktnummer	VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze, Festmontage R1101000		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

Inkl. Befestigungsschrauben für Wand. Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrekte Dübeln verwendet werden. Bitte Montageanleitung sehen.