


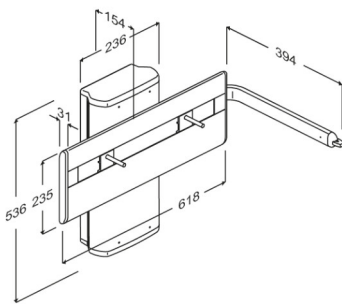

PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjdreglerbar med gascylinder R4650
Beskrivning	VVS: 654002100 NRF: 6132532 RSK: 7972590 EAN: 5708590309439 HMI: 71762 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473  PLUS upphängning till tvättställ finns i elektriska, pneumatiska och manuellt höjdjusterbara versioner. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor. PLUS upphängning till tvättställ med gascylinder, 300 mm steglös höjdreglering, reglaget placerat intill tvättstället. Manövreringsgreppet kan även fungera som handdukshängare. Greppet kan placeras på höger eller vänster sida om tvättstället. Till tvättställ på 16-22 kg. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2067/R2065. Material: Aluminium, plastmaterial. Inkl. monteringsskruvar till tvättställ. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar Höjdjustering	Höjdreglerbar 300 mm



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuell höjreglerbar med gascylinder R4650
Produktkapacitet	Maximal belastning: 135 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 135 kg, är varje väggmonteringsskruv belastad med 57 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp. Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 135 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 151 kg belastar tvättstället.</i>
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

Product	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt
Varunummer	höjddreglerbar med gascylinder R4650
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter - Maskindirektivet 2006/42/EEG

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®