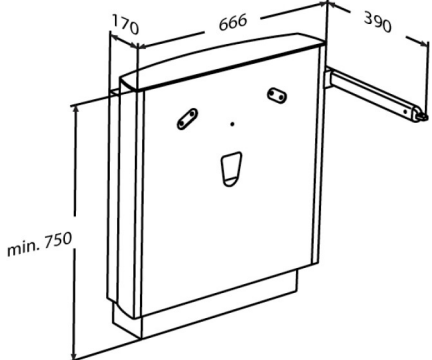




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	SELECT vaskophæng, gulvstående med vægmontering, elektrisk højderegulerbart med betjeningsgreb, inkl. sikkerhedsstopfunktion R4952000
<b>Farve</b>	VVS: 654005300 NRF: 6132449 EAN: 5708590349091 HMI: 105956 FDA: ILW/D142473 Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>SELECT vaskeløfter, gulvstående. Elektrisk højderegulerbar 300 mm med betjeningsgreb, inkl. sikkerhedsstopfunktion. Anbefales med til- og afløbssystem R2065. Inkl. monteringsbolte til håndvask (Anbefales med MATRIX SMALL OG MATRIX CURVE håndvaske). Ekskl. monteringskruser til væg. Se Teknisk datablad (pdf) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper.</p> <p>SELECT vaskeløfter, gulvstående. Elektrisk højderegulerbar 300 mm med betjeningsgreb, inkl. sikkerhedsstopfunktion. Anbefales med til- og afløbssystem R2065. Inkl. monteringsbolte til håndvask (Anbefales med MATRIX SMALL OG MATRIX CURVE/NEW CURVE håndvaske). Materialer: Anodiseret aluminium og polystyren (PS). Ekskl. monteringskruser til væg.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højderegulerbar
<b>Reguleringshøjde</b>	300 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maksimal belastning: 150 kg. Passer til vaske der vejer op til 22 kg. Når vasken belastes med 150 kg, belastes hver vægmonteringskruse med 18 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> <b>Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 150 kg og vasken vejer 22 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 171 kg støtter sig til vasken.</b>



<b>Produkt</b>	SELECT vaskophæng, gulvstående med vægmontering, elektrisk højderegulérbart med betjeningsgreb, inkl. sikkerhedsstopfunktion
<b>Varenummer</b>	R4952000
<b>Hastighed opad</b>	Hastighed op: 21 mm/s Hastighed ned: 21 mm/s
<b>Støjniveau</b>	45 dB
<b>Materialer</b>	Anodiseret aluminium. Frontpladerne er i polystyren. Topplade i kompaktlaminat. <i>Brændbarhedstestet (ISO 8191-1 og ISO 8191-2). Testrapport tilgængelig.</i>
<b>Ergonomi</b>	Løfterens stramme og rene design med de glatte flader er både let at gøre rent og smukt at se på i det daglige. Samtidig er det med til at sikre høj hygiejne på badeværelset. De eksklusive aluminiumprofiler er både slidstærk, lette og elegante at se på.
<b>Funktioner</b>	Vasken hæves eller sænkes med et fastmonteret greb for enden af vasken. Grebet kan placeres på begge sider af vasken og fungerer samtidig som håndklædeholder. Håndgrebet med den integrerede betjeningskontakt er stærkt nok til at blive brugt som ekstra støtte. Vasken kan reguleres 300 mm op eller ned – fra 670 til 970 mm over gulvet.
<b>Strømforsyning (V)</b>	230
<b>Aktuator (motor)</b>	LA31 Careline, (Linak), 1500N, IPX4
<b>Styreboks</b>	CB9 Careline, (Linak), IPX6
<b>Håndbetjening</b>	HB7, (Linak) IP66
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 75 W Strømforbrug, standby: 1,5 W
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

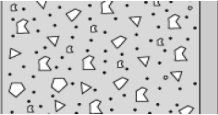
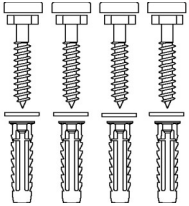

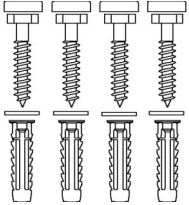
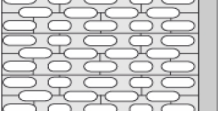
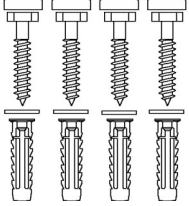
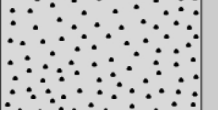
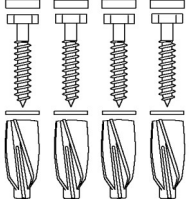
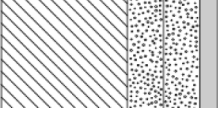
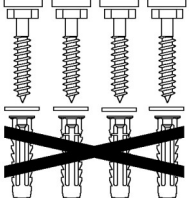


<b>Produkt</b>	SELECT vaskophæng, gulvstående med vægmontering, elektrisk højderegulérbart med betjeningsgreb, inkl. sikkerhedsstopfunktion
<b>Varenummer</b>	R4952000
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> <p><b>WEEE</b> Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.</p>

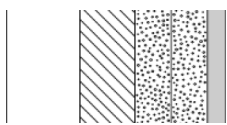
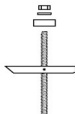

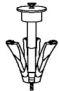
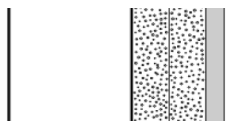
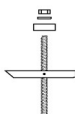

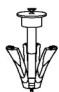
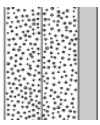
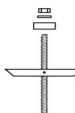

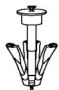


<b>Produkt</b>	SELECT vaskophæng, gulvstående med vægmontering, elektrisk højderegulérbart med betjeningsgreb, inkl. sikkerhedsstopfunktion
<b>Varenummer</b>	R4952000

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= Hlz12</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	SELECT vaskophæng, gulvstående med vægmontering, elektrisk højderegulérbart med betjeningsgreb, inkl. sikkerhedsstopfunktion R4952000	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.