




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MCT 2 mobilt skifteleje , elektrisk højderegulérbart R9432721000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS: 777542220 EAN: 5708590373218 HMI: 128432  Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren. MCT 2 mobilt skifteleje, 820 x 2190 mm, to nedfældbare sider. Elektrisk højderegulérbart (batteridrevet) med håndbetjening. 400 mm højderegulering fra 550 til 950 mm. Udstyret med centralbremse, trådsuffe til opbevaring, hjørnebeskyttere på alle fire hjørner samt batteri og oplader. Løftesøjlerne og håndbetjeningen er IPX6, batteri og oplader er IPX5. Madras skal bestilles separat.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet Hastighed opad	Højderegulérbar 400 mm Maksimal brugervægt (MUM): 200 kg. Maksimal belastning (SWL): 250 kg (brugervægt + vand + tilbehør). <i>Lejet er testet statisk med 625 kg, i henhold til kravene i IEC 60601-1 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 2,5.</i> Hastighed op: 19 mm/s Hastighed ned: 19 mm/s
Materialer	Aluminium, kunststof, Compact Density Fiberboards (CDF) og lakeret rustfrit stål.

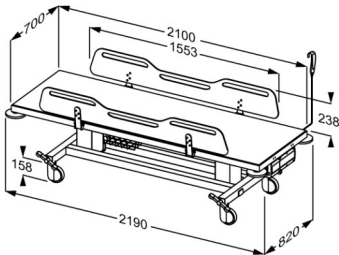

Produkt	MCT 2 mobilt skifteleje , elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R9432721000
Ergonomi	• De ergonomisk designede sengeheste har en praktisk sænket midterdel, som giver bedre adgang og arbejdsmiljø for plejeren både ved forflytning, skiftning og påklædning af brugeren. • Énhånds betjente sengeheste gør det muligt for plejeren at opretholde øjenkontakt såvel som fysisk kontakt med brugeren under hele processen. De nedfældbare sengeheste giver også let adgang fra alle fire sider af lejet. • De udskårne greb i sengehestene gør det muligt for brugerne selv at hjælpe til, når de vendes, hvilket motiverer fysisk træning. • En trådsuffe gør det muligt for plejeren at opbevare toiletartikler og placere det, der er nødvendigt til plejesituationen, lige ved hånden inden start. • Let at rengøre, med glatte kontaktflader der ikke samler snavs og bakterier.
Funktioner	• Lejet kan nemt flyttes fra rum til rum, og bruges af flere brugere. To løftesøjler bruges til at skabe en æstetisk tiltalende, hygiejnisk optimeret, samt fysisk og visuelt stabil konstruktion. • Intuitive, brugervenlige og nedfældbare sengeheste med énhånds betjening. • Centralbremsen gør det muligt for plejeren at låse alle fire hjul samtidigt ved at træde på en enkelt aktivator, hvilket sikrer bedre sikkerhed og brugervenlighed i enhver position. • Alle låse- og frigørelsesaktivatorer aktiveres ved at træde ned på dem ovenfra for at sikre ergonomisk interaktion og for at forhindre fod- og taskader. Skridsikker overflade og mønster på alle bremses forhindrer at foden glider, selv under våde forhold. • En roterende hjørnebeskytter på hvert af vognens hjørner beskytter omgivende vægge, dørkarme og selve produktet, hvis det kommer i kontakt med noget under flytningen. • Elektrisk højdejustering med batteri og oplader. Den væghængte oplader til batteriet kan monteres i ethvert rum inkl. også uden for badeværelset, hvis det ønskes. Når batteriet er ved at løbe tør, lyder der et bip, hver gang håndbetjeningen aktiveres. • Batteriets opladningstid er ca. 3-4 timer.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	BL1 (Linak) IPX6
Styreboks	COL50 (Linak) IPX6
Batteri	BAL50 Li-Ion (Linak) IPX6
Håndbetjening	HB30 (Linak) IPX6
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 80,5 W Strømforbrug, standby: 0,5 W



PRESSALIT®

Produkt	MCT 2 mobilt skifteleje , elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R9432721000
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr - Maskindirektivet 2006/42/EØF - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®

Produkt	MCT 2 mobilt skifteleje , elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R9432721000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®