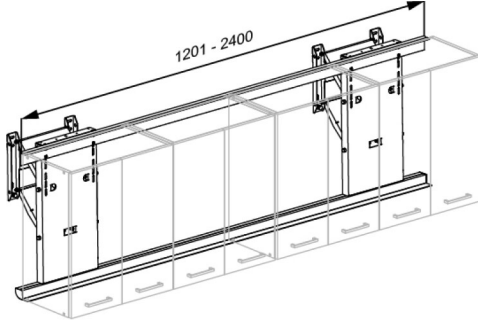




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	INDIVO løfteenhed til overskabe 1201-2400 mm RK1421
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>EAN:5708590378879</p>  <p>Pressalit INDIVO løfteenheder kan nemt integreres i det private hjem, de sikrer at hele familien kan få glæde af, og udnytte køkkenets fulde potentiale med hjælp af den højdejusterbare funktion. Løfteenhederne kan også være med til at skabe en fleksibel køkkenløsning til f.eks. plejecentre, skolekøkkener og skolelaboratorier samt mange andre steder hvor der er behov for hyppige højdejusteringer af køkkenbordplader og skabe.</p> <p>INDIVO løfteenhed til overskabe, med to el-motorer og styreboks. Højderegulérbar 430 mm med sargkontakt eller håndbetjening. Ved højderegulering nedad kører løfteenheden samtidig 180 mm frem mod brugeren. Til overskabe 1201-2400 mm i bredden. Bemærk: Den maksimale højde på overskabe er 725 mm. Hvis et overskab skal være højere end dette, skal der tilføjes en forlængelse RK1065 eller RK1066. Højde, bredde og dybde på skabene angives ved bestilling. Ekskl. monteringskit.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højderegulérbar
<b>Reguleringshøjde</b>	430 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maks. belastning: 1 motorkonsol: 110 kg, 2 motorkonsoller: 220 kg.
<b>Hastighed opad</b>	Hastighed op: 18 mm/s Hastighed ned: 18 mm/s
<b>Støjniveau</b>	48 dB
<b>Materialer</b>	Motorkonsol: Stål Tværprofiler: Aluminium Kabelbakke: ABS-plast



<b>Produkt</b>	INDIVO løfteenhed til overskabe 1201-2400 mm
<b>Varenummer</b>	RK1421
<b>Ergonomi</b>	<p>Løfteenhederne tilpasser nemt overskabe til både stående og siddende brugere og skaber komfort for alle.</p> <p>Regulering af overskabe til komfortabel arbejds højde sker ved hjælp af kontakter, som placeres i bordpladens forkant.</p>
<b>Funktioner</b>	<p>Løfteenheder højdereguleres ved hjælp af kontakter i sargen. Kontakterne er farvekodede - aluminium for betjening af bordplader og rød for betjening af overskabe.</p> <p>Som alternativ eller supplement til sargkontakterne kan der tilkøbes en håndbetjening.</p> <p>Løfteenhedens konstruktion sikrer, at konsollerne syner minimalt uanset skabenes position.</p> <p>Når overskabene sænkes 430 mm til laveste position, føres de samtidig 180 mm frem mod brugeren.</p> <p>Løfteenhederne kan bære kombinationer af overskabe i alle længder mellem 400 mm og 2400 mm.</p>
<b>Aktuator (motor)</b>	LA31 Deskline (Linak), 3500N, IPX1
<b>Styreboks</b>	CBD4 (Linak) IP22
<b>Håndbetjening</b>	HB53 (Linak), IPX1
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 187 W Strømforbrug, standby: 1,5 W
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

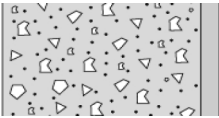
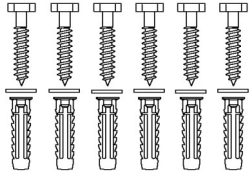

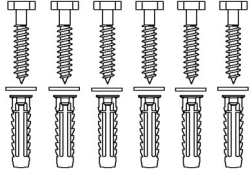
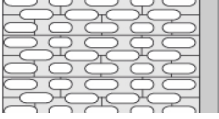
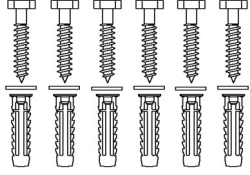
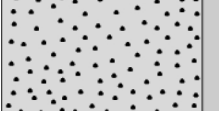
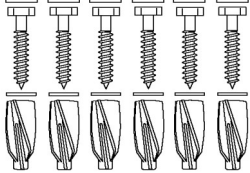
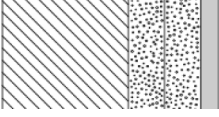
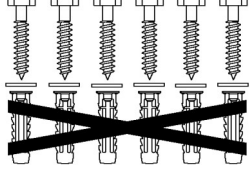


<b>Produkt</b>	INDIVO løfteenhed til overskabe 1201-2400 mm
<b>Varenummer</b>	RK1421
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.

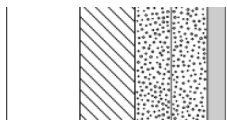
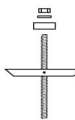

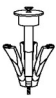
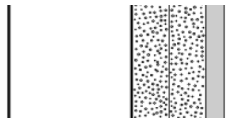
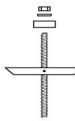


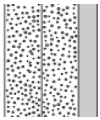
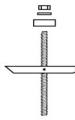




<b>Produkt</b>	INDIVO løfteenhed til overskabe 1201-2400 mm
<b>Varenummer</b>	RK1421

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= Hlz12</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	INDIVO løfteenhed til overskabe 1201-2400 mm RK1421	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.