




Produkt Varenummer	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart R4780
Produktbeskrivelse	<p>VVS: 654003210 NRF: 6132537 RSK: 7972595 EAN: 5708590309330 HMI: 71756 NBS: N13:30,335</p>  <p>PLUS vaskophæng fås i elektrisk, pneumatisk (gasdrevet) og manuelt højderegulérbare versioner. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>PLUS vaskophæng, eldrevet med betjeningsgreb, som er placeret ved front af håndvask. Betjeningsgrebet kan fungere som håndklædeholder, og kan placeres på højre eller venstre side af vasken. Elektrisk højderegulérbart 300 mm og sideværts regulérbart uden brug af værktøj. Anbefales med til- og afløbssystem R2064/R2065/R2067. Materialer: Aluminium og kunststof. Inkl. monteringsbolte til håndvask. Til montering på vandret vægskinne (medfølger ikke).</p>
Justerbarhed	Højde- og sideværts regulérbar
Reguleringshøjde	300 mm
Produktkapacitet	<p>Maksimal belastning: 100 kg. Passer til vaske der vejer op til 22 kg. Når vasken belastes med 100 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 22 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 100 kg og vasken vejer 22 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 104 kg støtter sig til vasken.</p>
Hastighed opad	Hastighed op: 20 mm/s Hastighed ned: 23 mm/s

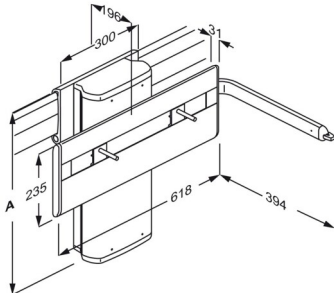

Produkt	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart
Varenummer	R4780
Støjniveau	45 dB
Materialer	Vaskophænget er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Endeafdækningerne er fremstillet i ABS. Vaskophænget leveres med et betjeningsgreb, der består af en kontakt i ABS, der er placeret for enden af et fast greb i anodiseret aluminium.
Ergonomi	Håndvasken kan bevæges op og ned ved hjælp af betjeningsgrebet. Det er let og enkelt for en hjælper eller for en selvhjulpne bruger at indstille håndvasken til den ønskede højde. Vaskophænget passer til alle typer håndvaske med boltmontering. Afrundet og slankt design gør rengøringen let og ukompliceret.
Funktioner	Betjeningsgreb er monteret for enden af et fast greb, der kan fungere som støtte og håndklædeholder. Betjeningsgrebet er som standard placeret i højre side, men kan også placeres i venstre side.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40 (Linak) 4000N, IPX6
Styreboks	SMPS14002
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 75 W Strømforbrug, standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart
Varenummer	R4780
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
Overensstemmelses-erklæring	<p>Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr- Maskindirektivet 2006/42/EØF- RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart
Varenummer	R4780

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®