


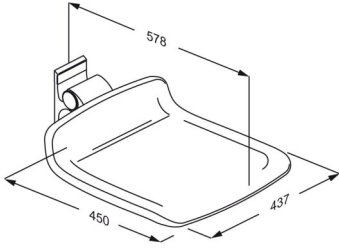

# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS duschsits 450, fast höjd R7404108
<b>Färg</b>	NRF:6317103 EAN:5708590359496 HMI: 124480 FDA:INN/D135865  Mörkblå (RAL 5011)
<b>Beskrivning</b>	 <p>PLUS duschstolar erbjuds i flera färger. De finns både som fasta, elektriskt justerbara och manuellt justerbara, med och utan hål, och med möjlighet till rygg och armstöd. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor.</p> <p>PLUS duschsits 450, uppfällbart. Fast höjd Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Exkl. monteringskrav för vägg.</p>
<b>Justerbar</b> <b>Produktkapacitet</b>	Fast höjd  Max brukarvikt: 200 kg När duschsitsen belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 113 kg.  <i>PLUS duschsitsar testas statistiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
<b>Material</b> <b>Ergonomi</b> <b>Funktioner</b>	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på sätet är förseglade med ändpluggar i ABS.  Ergonomisk sits - säte 450 x 437 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort.  Sits kan fällas upp mot väggen efter användning.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.




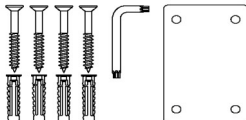
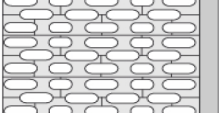
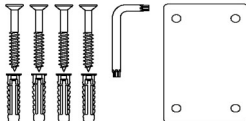
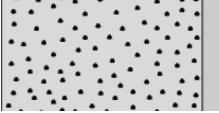
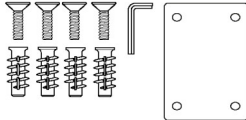
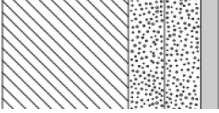
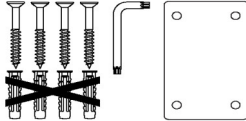


<b>Product</b>	PLUS duschsits 450, fast höjd
<b>Varunummer</b>	R7404108
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b>Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>









<b>Product</b>	PLUS duschsits 450, fast höjd
<b>Varunummer</b>	R7404108

## Montage i olika väggtyper

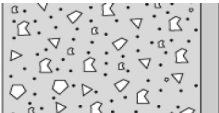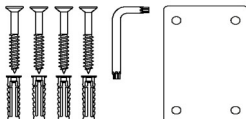	<b>Betong &gt;B25</b> V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8654 - Monteringsset, 4 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	

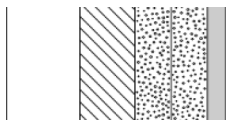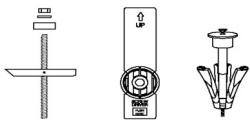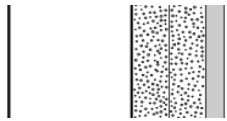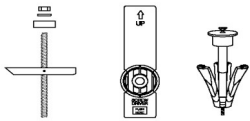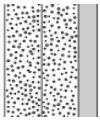

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS duschsits 450, fast höjd R7404108
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.