




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MSCT 1 mobilt bruse/skifteleje, elektrisk højderegulérbart R9434721000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS: 777542420 EAN: 5708590373232 HMI: 128428  Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren. MSCT 1 mobilt bruse/skifteleje, 820 x 2190 mm, fire nedfældbare sider. Elektrisk højderegulérbart (batteridrevet) med håndbetjening. 400 mm højderegulering fra 550 til 950 mm. Kan tilte 3 grader (sikrer at vandet løber ud af afløbet). Udstyret med centralbremse, trådskeff til opbevaring, hjørnebeskyttere på alle fire hjørner samt batteri og oplader. Løftesøjlerne og håndbetjeningen er IPX6, batteri og oplader er IPX6. Brusemadras og hovedstøtte skal bestilles separat.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	400 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt (MUM): 200 kg. Maksimal belastning (SWL): 250 kg (brugervægt + vand + tilbehør). <i>Lejet er testet statisk med 625 kg, i henhold til kravene i IEC 60601-1 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 2,5.</i>
Hastighed opad	Hastighed op: 19 mm/s Hastighed ned: 19 mm/s
Materialer	Aluminium, kunststof, Compact Density Fiberboards (CDF) og lakeret rustfrit stål.

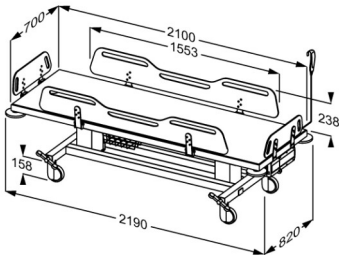

Produkt	MSCT 1 mobilt bruse/skifteleje, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R9434721000
Ergonomi	• De ergonomisk designede sengeheste har en praktisk sænket midterdel, som giver bedre adgang og arbejdsmiljø for plejeren både ved forflytning, badning, tørring, skiftning og påklædning af brugeren. • Énhånds betjente sengeheste gør det muligt for plejeren at opretholde øjenkontakt såvel som fysisk kontakt med brugeren under hele processen. De nedfældbare sengeheste giver også let adgang fra alle fire sider af lejet. • De udskårne greb i sengehestene gør det muligt for brugerne selv at hjælpe til, når de vendes, hvilket motiverer fysisk træning. • En trådsuffe gør det muligt for plejeren at opbevare toiletartikler og placere det, der er nødvendigt til plejesituationen, lige ved hånden inden start. • Let at rengøre, med glatte kontaktflader der ikke samler snavs og bakterier.
Funktioner	• Lejet kan nemt flyttes fra rum til rum, og bruges af flere brugere. To løftesøjler bruges til at skabe en æstetisk tiltalende, hygiejnisk optimeret, samt fysisk og visuelt stabil konstruktion. • Intuitive, brugervenlige og nedfældbare sengeheste med énhånds betjening. • Centralbremsen gør det muligt for plejeren at låse alle fire hjul samtidigt ved at træde på en enkelt aktivator, hvilket sikrer bedre sikkerhed og brugervenlighed i enhver position. • Alle låse- og frigørelsesaktivatorer aktiveres ved at træde ned på dem ovenfra for at sikre ergonomisk interaktion og for at forhindre fod- og tåskader. Skridsikker overflade og mønster på alle brems forhindrer at foden glider, selv under våde forhold. • En roterende hjørnebeskytter på hvert af vognens hjørner beskytter omgivende vægge, dørkarme og selve produktet, hvis det kommer i kontakt med noget under flytningen. • Elektrisk højdejustering med batteri og oplader. Den væghængte oplader til batteriet kan monteres i ethvert rum inkl. også uden for badeværelset, hvis det ønskes. Når batteriet er ved at løbe tørt, lyder der et bip, hver gang håndbetjeningen aktiveres. • Batteriets opladningstid er ca. 3-4 timer.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	BL1 (Linak) IPX6
Styreboks	COL50 (Linak) IPX6
Batteri	BAL50 Li-Ion (Linak) IPX6
Håndbetjening	HB30 (Linak) IPX6
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 80,5 W Strømforbrug, standby: 0,5 W



PRESSALIT®

Produkt	MSCT 1 mobilt bruse/skifteleje, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R9434721000
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

Produkt	MSCT 1 mobilt bruse/skifteleje, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R9434721000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®