




PRESSALIT®

<b>Article</b>	VALUE support de lavabo, réglable en hauteur manuellement à verin à gaz
<b>Numéro article</b>	R1210000
	VVS:654011300 NRF:6191663 EAN:5708590176710 HMI: 25575 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Déscription</b>	<p>VALUE support de lavabo, montage mural. Réglable en hauteur manuellement de 315 mm, avec levier de commande par compensation à gaz. Flexibles R2065/R2067 recommandés.</p> <p>Avec fixations pour lavabo. Vis de montage incluses. Chevilles à commander séparément.</p> <p>VALUE support de lavabo, montage mural. Réglable en hauteur manuellement de 315 mm, avec levier de commande par compensation à gaz. Flexibles R2065/R2067 recommandés. Matériaux : acier à revêtement Rilsan. Avec fixations pour lavabo. Vis de montage incluses. Chevilles à commander séparément.</p>
<b>Réglage</b>	Réglable en hauteur
<b>Hauteur de réglage</b>	315 mm

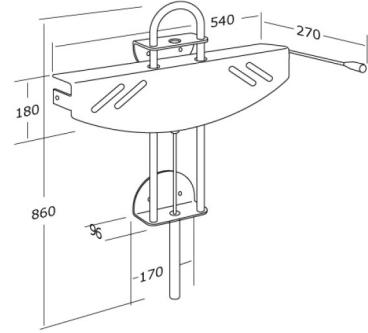



<b>Article</b>	VALUE support de lavabo, réglable en hauteur manuellement à verin à gaz
<b>Numéro article</b>	R1210000
<b>Capacité du produit</b>	<p>Charge maximale admissible : 80 kg. Convient pour des lavabos jusqu'au 22 kg. Lorsque le lavabo est chargé de 80 kg, chaque vis de montage est chargé de 20 kg. <i>Le support de lavabo doit être en mesure de supporter le poids du lavabo ainsi que le poids d'une personne s'appuyant dessus pendant sa toilette ou s'en aidant pour se relever quand elle est assise.</i></p> <p><b><i>Ni le lavabo ni le support de lavabo ne sont conçus pour porter ou transporter le poids d'une personne, et les méthodes de test applicables au support de lavabo reflètent les exigences suivantes : La norme ISO 17966 prescrit un test statique sur le bord avant du lavabo chargé à 75% du poids maximal de l'utilisateur.</i></b></p> <p><b><i>Par exemple : pour une charge maximale admissible du support annoncée à 80 kg avec un lavabo de 22 kg, selon la norme ISO 17966, cela équivaudrait à un utilisateur pesant 77 kg qui se pencherait sur le bord avant du lavabo.</i></b></p>
<b>Materiaux</b>	<p>La matière de base: Acier</p> <p>La matière de surface: Rilsan</p>
<b>Fonctions</b>	Réglable en hauteur de 315 mm
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



<b>Article</b>	VALUE support de lavabo, réglable en hauteur manuellement à verin à gaz
<b>Numéro article</b>	R1210000
<b>Nettoyage</b>	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Clinimax Difficil-S</li><li>Erisan OXY+</li><li>Sprit (husholdningssprit)</li><li>Suma Bac D10</li><li>Virkon</li><li>Rodalon Desinfektionsspray</li><li>Lysoformin Spezial</li><li>CaviCide</li><li>Sufanios Premium</li><li>Tvättssprit 70%</li></ul> <p><b>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Suma Star free D1</li><li>Taski 100</li><li>Taski 200</li><li>Milizid Citro</li></ul> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>