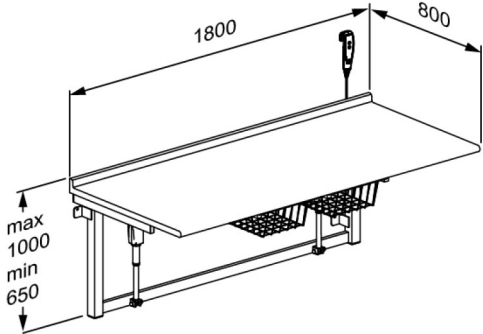




PRESSALIT®

| | |
|---|--|
| Produkt Varenummer | Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulerbart R8713000 |
| Farve | VVS: 777630030 NRF: 7501912 RSK: 8565144 EAN: 5708590286204 HMI: 48863 Hvid |
| Produktbeskrivelse |  <p>Pressalit tilbyder et bredt sortiment af både fritstående og vægmonterede pusleborde i flere størrelser og modeller, de vægmonterede fås bl.a. i en udgave med opklappelig bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads. Derudover fås de vægmonterede også i en lavtgående udgave, som især er populær i daginstitutioner og børnehaver, da de kan sænkes til en højde, der gør det muligt for barnet selv at klatre op på puslebordet. Alle typer af pusleborde findes i udgaver med både vask og mulighed for tilvalg af enten udtræksarmatur eller standardarmatur.</p> <p>Væghængt puslebord, 800 x 1800 mm. Med el-motor og transformator, højderegulering 650 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Laminatbordplade, inkl. 2 trådkurve. Materialer: Laminat og pulverlakeret stål. Ekskl. monteringskrue til væg.</p> |
| Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet Hastighed opad Støjniveau | Højderegulerbar 350 mm Max. belastning: 150 kg. Hastighed op: 14 mm/s Hastighed ned: 14 mm/s 48 dB |
| Materialer | Løfteenhed og kurve: Pulverlakeret stål. Bordplade: Laminat. |



| | |
|---------------------------------------|---|
| Produkt | Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart |
| Varenummer | R8713000 |
| Ergonomi | Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejdshøjde. De robuste materialer letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større tryghed i en travl hverdag. |
| Funktioner | Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejdshøjde ved hjælp af håndbetjeningen. De robuste materialer letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større tryghed i en travl hverdag. |
| Strømforsyning (V) | 230 |
| Aktuator (motor) | 2 x LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1 |
| Styreboks | CBD6 (Linak), IP20 |
| Håndbetjening | HB30 (Linak), IPX4 |
| Strømforbrug (max. belastning) | Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W Strømforbrug, standby: 0,1 W |
| Garanti | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. |

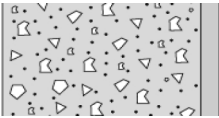
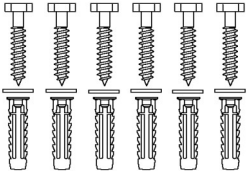

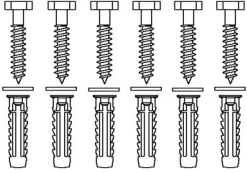
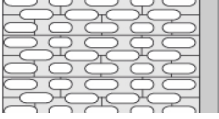
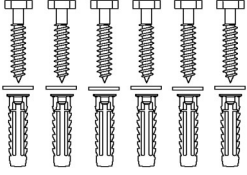
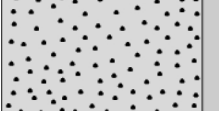
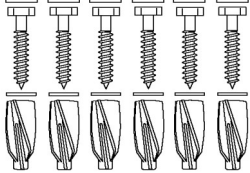
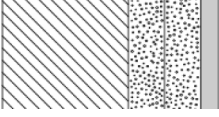
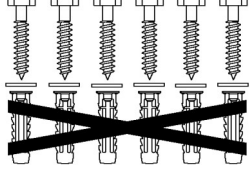


| | |
|-------------------|--|
| Produkt | Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulerbart |
| Varenummer | R8713000 |
| Rengøring | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> |
| WEEE | Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet. |

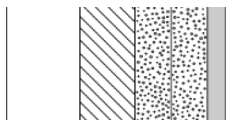
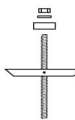

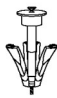
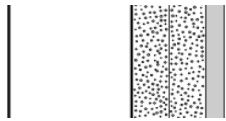
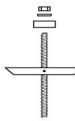

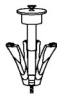
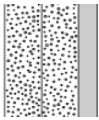



| | |
|-------------------|--|
| Produkt | Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulerbart |
| Varenummer | R8713000 |

Montering i forskellige vægtyper

| | | |
|---|---|---|
|  | Beton >B25 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat. |  |
|  | Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat. |  |
|  | Kalksten >= H1z12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat. |  |
|  | Gasbeton P4 V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat. |  |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat. |  |



| | | |
|---|--|---|
| Produkt Varenummer | Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulerbart R8713000 | |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |    |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |    |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskaade forbundet hermed. |  |