




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	VALUE IV Duschsitz, Festmontage R1620000112
Farbe	VVS:777525312 NRF:6314097 RSK:8565069 EAN:5708590377711 HMI: 124483 DB: 2296038 FDA:INN/D135865 Anthrazitgrau
Produkt- beschreibung	 Der hochklappbare Duschsitz und die passende Rückenlehne der VALUE IV Serie bieten eine einfache Lösung für Nutzer, die sich beim Duschen hinsetzen möchten. VALUE IV Duschsitz. Festeinbau. Sitz ist hochklappbar. Materialien: Aluminium, Rilsan-beschichtetem Edelstahl und Vakuumgeformtes Polyethylen (PE). Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden.
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Maximales Anwendergewicht: 135 kg. Bei einer Belastung der Duschsitz mit 135 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 125 kg. <i>VALUE Duschsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 1,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i>
Materialien	Das Wandscharnier ist aus Aluminium hergestellt und der Rahmen ist aus Rilsan-beschichtetem Edelstahl hergestellt. Rilsan-Beschichtung bietet einen optimalen Schutz gegen Korrosion, eine angenehme Haptik und die Möglichkeit der einfachen Reinigung. Der Sitz ist aus Vakuumgeformtes Polyethylen (PE) hergestellt.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgetauscht oder neu geliefert werden.

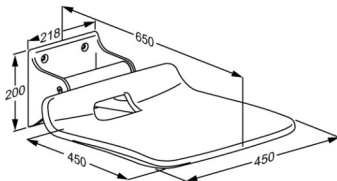

Produkt	VALUE IV Duschsitz, Festmontage
Produktnummer	R1620000112
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.