


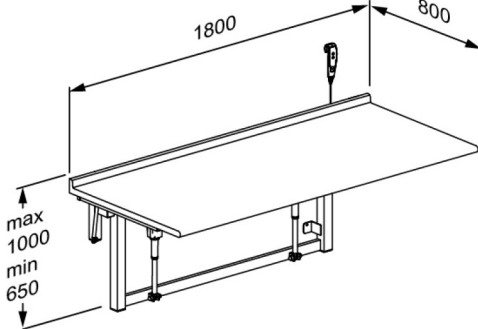

PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjdregerbart, uppfällbart R8723000
Färg	VVS:777630130 NRF:7501915 RSK:8565148 EAN:5708590286235 HMI: 48866 Vit
Beskrivning	 <p>Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme. Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet. Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur.</p> <p>Vägghängt, uppfällbart skötbord, 800 x 1 800 mm. Med elmotor och transformator, höjjustering från 650 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Material: Bänkskiva i laminat och pulverlackerat stål. Exkl. monteringskrav för vägg.</p>
Justerbar	Höjdregerbar
Höjjustering	350 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 150 kg.
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 14 mm/s Hastighet ner: 14 mm/s
Ljudnivå	48 dB
Material	Lyftenhet: Pulverlackerat stål. Bänkskiva: Laminat
Anslutnings ström (V)	230




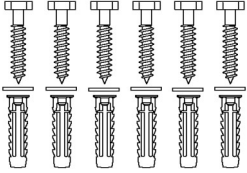
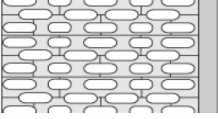
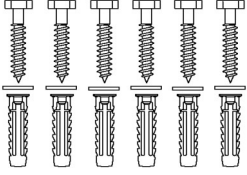
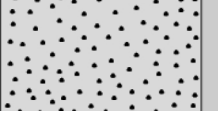
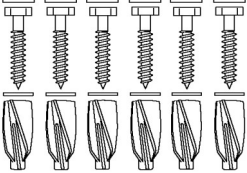
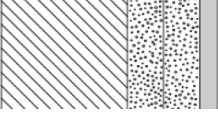
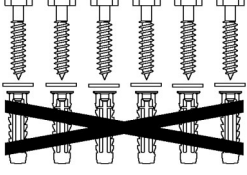


Product	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjddreglerbart, uppfällbart
Varunummer	R8723000
Motor	2 x LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Kontrollbox	CBD6 (Linak), IP20
Manöverdosa	HB30 (Linak), IPX4
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W Strömförbrukning vid standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.








Product	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjdregerbart, uppfällbart
Varunummer	R8723000

Montage i olika väggtyper

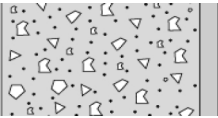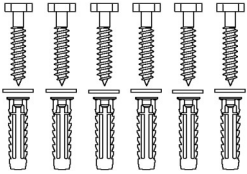	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	

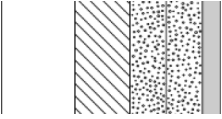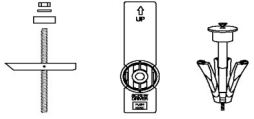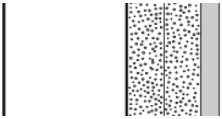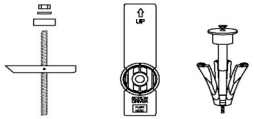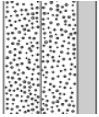

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjdglerbart, uppfällbart R8723000
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 