




Produkt Produktnummer	PLUS Rückenlehne, abnehmbar R6409108
Farbe	NRF:6317041 EAN:5708590366302 HMI: 124211 FDA:INN/D135865 Dunkelblau (RAL 5011)
Produkt- beschreibung	 <p>PLUS Rückenlehnen werden in verschiedenen Farben und Versionen angeboten. Sie sind sowohl in fester Höhe als auch verstellbar erhältlich. Sie eignen sich zur Wandmontage hinter einer Toilette ohne Spülkasten oder zur Montage an einem der Pressalit WC-Lifter SELECT.</p> <p>PLUS Rückenlehne, 385 x 209 mm, gepolstert. Feste Höhe, zur Montage auf SELECT TL1, TL2, TL3 oder TL4 WC-Lifter. Abnehmbar ohne Werkzeug und leicht wieder zu anbringen. Material: Aluminium und PUR-Schaumstoff mit einer in-mould-coating Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Für Montage auf WC-Lifter, inklusive Befestigungsmaterial.</p>
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Maximale Belastbarkeit: 50 kg. Maximales Benutzergewicht: 100 kg. Bei einer Belastung mit 50 kg, trägt jede Befestigungsschraube 118 kg. <i>Rückenlehnen müssen in der Lage sein, das Gewicht der Person zu tragen, die sich dagegen lehnt. Die Rückenlehne soll nicht das gesamte Körpergewicht einer Person tragen. Eine für die Rückenlehne geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung bei 50% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 50 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 100 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i>
Materialien Ergonomie Funktionen	Der Rückenlehne ist aus PUR-Schaumstoff hergestellt und ist mit einer Oberflächenbeschichtung versehen sowie mit PUR-Klarlack geschützt. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Kanten der Rückenlehne sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt. Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an. Der Rückenlehne kann mit hochhängendem Spülkasten verwendet werden.

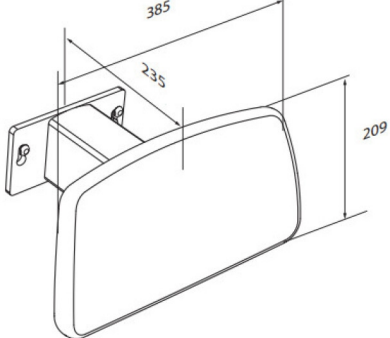

Produkt	PLUS Rückenlehne, abnehmbar
Produktnummer	R6409108
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Erisan OXY+ Tvättspit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Wichtig: PUR-Oberflächen von PLUS Duschsitze und PLUS Rückenlehne erhalten ein anti-bakterielles Coating, das durch andere Reinigung als Wasser und Seife zerstört werden kann.</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Rückenlehne, abnehmbar
Produktnummer	R6409108

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®