




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, vänster hand manövrerad R391385000
<b>Färg</b>	VVS:615883200 NRF:6191161 RSK:8487454 EAN:5708590368870 HMI: 125890 FDA:ILS/D135866 Vit
<b>Beskrivning</b>	 <p>Alla toalettstöd PLUS har en integrerad dämparfunktion som säkerställer att stödet sänks kontrollerat från vertikalt till horisontellt läge. Lämplig för användning med vägghängda toaletter där avståndet från vägg till front är 700 mm, och för golvstående toaletter. <i>Ersätter utgående modeller R3575 och RF575.</i></p> <p>PLUS toalettarmstöd med fjäderbelastning. Total längd 920 mm. Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig. Vänster hand manövrerad. Höjdregerbart 240 mm och sidoregerbart. Avtagbart och uppfällbart. Antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast. Till eftermontering på existerande vågrät PLUS väggskena (medföljer ej).</p>
<b>Justerbar</b> <b>Höjjustering</b> <b>Produktkapacitet</b>	Höjd- och sidoregerbar 240 mm Maximal belastning: 150 kg. När toalettarmstöden belastas med 150 kg, belastas varja monterings skruv med 44 kg. <i>PLUS toalettarmstöd är testad statiskt med respektive 700 kg (tät på väggen), 425 kg (på midten) och 225 kg (på yterpunkt).</i>
<b>Material</b>	Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en glasförstärkt nylonkärna. Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål.

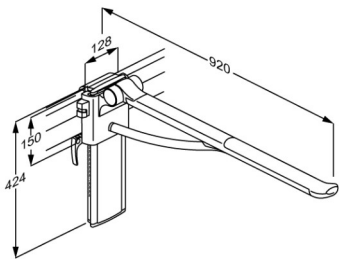

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, vänster hand manövrerad R391385000
<b>Ergonomi</b>  <b>Funktioner</b>	<p>Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmstöd ger ökad trygghet till den sittande brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel. Ett bra toalettarmstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa eller sätta sig.</p> <p>Toalettarmstöden är försedda med ett gångjärn som gör det möjligt att fälla upp toalettarmstöden mot väggen. Uppfällbara toalettarmstöd ger gott om plats i rummet när de inte används. Toalettarmstöd monterade på väggskenor ger stor flexibilitet i den enskilda brukarens behov för plats och stöd.</p>
<b>Garanti</b>  <b>Rengöring</b>	<p>Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.</p> <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbelägningen kan uppstå.</p>



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, vänster hand manövrerad R391385000
	<p><b>Avsedd användning</b> Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig från en toalett, eller vid sidoflyttning från rullstol.</p> <p><b>Användningsmiljö</b> För användning inomhus i våtrumsmiljö, till exempel ett badrum, i privata hem, på vårdhem och sjukhus. Vid yrkesmässig användning är den förväntade livslängden 10 år. <i>Livscykeltest har utförts enligt ISO 17966:2016.</i></p> <p>För underhåll hänvisas till användnings – underhållsinstruktion som är anslutna till produkten, detta finns på hemsidan under "Downloads".</p> <p><b>Link til eBVD:</b> <a href="https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/4200/0/Pdf">https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/4200/0/Pdf</a></p> <p>Denna produkt har fått följande bedömning: Byggvarubedömningen: Accepteras</p>