


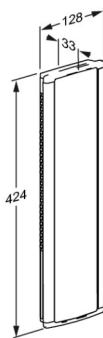

PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS wandrail, 400 mm, gegroefd links, voor verticale montage R9873112
Kleur	VVS:615843134 NRF:7501072 EAN:5708590369280 HMI: 124111 Antracietgrijs 
Beschrijving	Zie hieronder voor een selectie van producten voor montage aan de wandrail. PLUS wandrail, 400 mm, gegroefd links, voor verticale montage. Voor in hoogte verstelbare toiletsteunen met linkshandige bediening. De afdekplaat verbergt bouten en draden en vergemakkelijkt de reiniging. Materialen: Aluminium en polystyrene. Exclusief bevestigingsset.
Verstelbaarheid	Vaste montage
Materialen	De wandrail is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De afdekplaat is gemaakt van polystyreen en de uiteinden van de wandrail zijn afgedekt met ABS-polymeer.
Ergonomy	De verticale wandrail maakt hoogteverstelling van de verschillende producten mogelijk. In combinatie met het horizontale wandrail kan de beschikbare ruimte in de badkamer optimaal worden benut. In omgevingen met meerdere gebruikers maakt de verticale wandrail het mogelijk om de verschillende producten aan te passen naar de hoogte voor de individuele gebruiker.
Functie	De voorste afdekplaat verbergt montage bouten en eventuele kabels.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS wandrail, 400 mm, gegroefd links, voor verticale montage R9873112
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit het oppervlak kan beschadigen. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag van muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van drie delen 30% azijnzuur op zeven delen leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn weggespoeld, moeten de onderdelen worden afgeveegd met een vochtige doek die is uitgewrongen in helder water. "
Conformiteits verklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in risico klasse I. Het product is toebehoren van medische hulpmiddelen, hoewel het zelf geen medisch hulpmiddel is, maar is om samen met een of meer specifieke medische hulpmiddelen te worden gebruikt om het met name mogelijk te maken dat de medische hulpmiddelen worden gebruikt overeenkomstig de beoogde doeleinden ervan.



Product	PLUS wandrail, 400 mm, gegroefd links, voor verticale montage
Artikelnummer	R9873112

Installatie in verschillende wandtypes

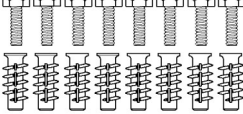	Betonwanden >B25 V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld. 
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld. 
	Kalksteen>=Hlz12 V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld. 
	Gasbeton P4 V8660 - Bevestigingsmateriaal, 8 bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8. Moeten apart worden besteld. 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld. 



Product Artikelnummer	PLUS wandrail, 400 mm, gegroefd links, voor verticale montage R9873112		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.		

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.