




PRESSALIT®

| | |
|---|--|
| Product Varunummer | PLUS ryggstöd, fast höjd R6404000 |
| Färg | VVS: 777530200 NRF: 6317031 EAN: 5708590365350 HMI: 124215 FDA: INN/D135865 Vit |
| Beskrivning |  <p>PLUS ryggstöd finns i flera färger och versioner, de finns både som fasta och justerbara. De är lämpliga för användning bakom en vägghängd toalett utan cisternen eller för montering på en av Pressalits toalettlyftare.</p> <p>PLUS ryggstöd, 385 x 209 mm, vadderad. Fast höjd, för montering bakom långsträckt toalett utan cistern. Material: Aluminium och mjukt porslän med tråkärna. Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.</p> |
| Justerbar Produktkapacitet | Fast höjd Maximal belastning: 50 kg. Maximal användarvikt: 100 kg. När ryggstödet är belastat med 50 kg, är varje väggmonteringskruva belastad med 118 kg. <i>Ryggstödet bör kunna bära vikten hos en person som belastar ryggstödet.</i> Ryggstödet är inte personbärande och den testmetoder som föreskrivs för ryggstöd återspeglar detta: ISO 17966 kräver att ryggstöd testas statistiskt med 50% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett ryggstöd är 50 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 100 kg belastar ryggstödet. |
| Garanti | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. |

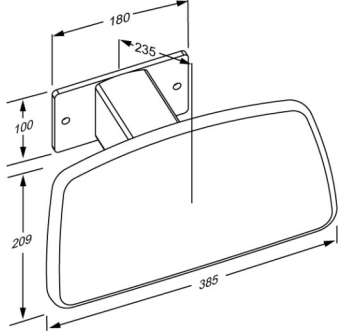

| | |
|-------------------|---|
| Product | PLUS ryggstöd, fast höjd |
| Varunummer | R6404000 |
| Rengöring | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:Erisan OXY+ Tvättspirit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |