


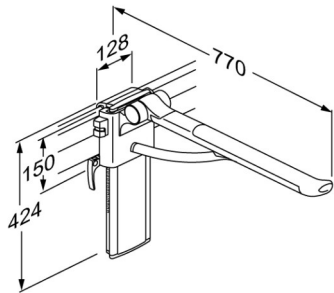

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS toiletstøtte, 700 mm, venstrehåndsbetjent R391370112
<b>Farve</b>	VVS:615883112 NRF:6191158 RSK:8487453 EAN:5708590368856 HMI: 125893 FDA:ILS/D135866 Antracitgrå
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>Alle PLUS toiletstøtter er med integreret dæmperfunktion, der sikrer at støtten sænkes kontrolleret fra lodret til vandret position. Velegnet til brug sammen med væghængte toiletter, hvor afstand fra væg til front af toilet er 540/550 mm. <i>Erstatter udgåede modeller R3550, RF550, R3565 og RF565.</i></p> <p>PLUS toiletstøtte med dæmperfunktion. Totallængde 770 mm, ergonomisk udformet, så den sikrer et godt greb, både når man står og når man sætter og rejser sig. Venstrehåndsbetjent. Højderegulérbar 240 mm og sideværts regulérbar uden brug af værktøj. Aftagelig og opklappelig. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Aluminium og termoplastisk elastomér, hvilket giver en slidstærk og rengøringsvenlig overflade. Til eftermontering på vandret vægskinne (medfølger ikke).</p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Reguleringshøjde</b> <b>Produktkapacitet</b>	Højde- og sideværts regulérbar 240 mm Maksimal belastning: 150 kg. Når toiletstøtten belastes med 150 kg, belastes hver monteringskrue i den vandrette vægskinne med 44 kg. <i>PLUS toiletstøtter er testet statisk med hhv. 700 kg (tæt på væggen), 425 kg (midt på) og 225 kg (på yderste punkt).</i>
<b>Materialer</b>	Toiletstøtten er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Gribefladerne er beklædt med en skridsikker overflade af en termoplastisk elastomér, der omslutter en glasforstærket nylonkerne.



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS toiletstøtte, 700 mm, venstrehåndsbetjent
<b>Varenummer</b>	R391370112
<b>Ergonomi</b>	<p>Støttens ovale tværsnit (33 x 51 mm) sikrer et godt greb - både når man står, og når man sætter sig og rejser sig.</p> <p>Støttens afslutning er udformet, så håndens greb er fast og sikkert. Afslutningen er især en god støtte, når man sætter eller rejser sig. Samtidig opnås en klar fornemmelse af, hvor støtten slutter.</p> <p>Blødt og skridsikkert overflademateriale, der aldrig føles koldt.</p>
<b>Funktioner</b>	<p>Undersiden af støtten er udformet til montering af forskelligt tilbehør.</p> <p>Toiletstøtten kan klappes op.</p>
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



<b>Produkt</b>	PLUS toiletstøtte, 700 mm, venstrehåndsbetjent
<b>Varenummer</b>	R391370112
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>



<b>Produkt</b>	PLUS toiletstøtte, 700 mm, venstrehåndsbetjent
<b>Varenummer</b>	R391370112
	<p><b>Tilsligtet brug</b> Toiletstøtten bruges som hjælp til en person, når han eller hun sætter sig på eller rejser sig fra et toilet, eller ved sideværts forflytning fra en kørestol.</p> <p><b>Betjeningsmiljø</b> Til indendørs brug i våde omgivelser, som f.eks. et badeværelse eller vaskerum, i private hjem, på plejehjem og hospitaler. Ved institutionsbrug er den forventede levetid 10 år. <i>Der er foretaget levetidstest iht. ISO 17966:2016.</i></p> <p>For vedligehold, se brugermanual som er vedlagt produktet, og som kan findes på hjemmesiden under "Downloads".</p>