




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS stödhandtag för hörn 762 x 762 mm RT126035
Färg	VVS:777568335 NRF:6317183 EAN:5708590146362 HMI: 25426 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Röd (RAL 3003) 
Beskrivning	PLUS stödhandtag är produkter av hög kvalitet, som kan kombineras på en mängd olika sätt och fullände inredningen idet funktionella och praktiska badrummet. En stabil lösning med stödhandtag och ett otal kombinationsmöjligheter kan hjälpa brukaren att klara sig bättre på egen hand. PLUS stödhandtag, för hörn, 33 mm, vändbart höger/vänster A:762 mm x B:762 mm, för fast montering. Avståndet på 50 mm från vägg till stödhandtag på ett monterat stödhandtag gör det enkelt att greppa handtaget. Inkl. väggrosett, som gömmer monteringsskruvarna. Material: Pulverlackerat aluminium och plastmaterial. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Produktkapacitet	Max belastning: 235 kg. När stödhandtaget belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 56 kg. <i>Stödhandtag testas med säkerhetsfaktor 1,5 i enlighet med kraven i SS/ISO 17966:2016.</i>
Material Ergonomi	Pulverlackerad aluminium. Väggrosett: Cycloy-plast. Strop: Nylon (PA). Handtagets diameter är 33 mm. Handtaget ligger därför bra i handen och möjliggör ett stadigt grepp. Ett monterat handtag håller ett avstånd på 50 mm från väggen. Avståndet gör det lätt att greppa handtaget.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

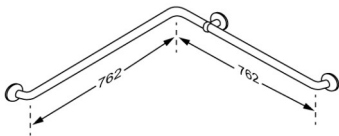

Product	PLUS stödhandtag för hörn 762 x 762 mm
Varunummer	RT126035
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå. Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/3451/0/Pdf Denna produkt har fått följande bedömning: Byggvarubedömningen: Accepteras








PRESSALIT®

Product	PLUS stödhandtag för hörn 762 x 762 mm
Varunummer	RT126035

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8667 - Monteringsset 12 st. M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	

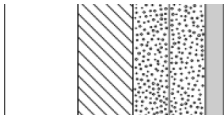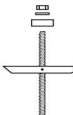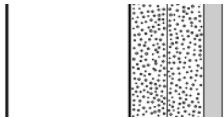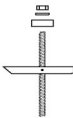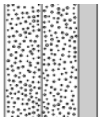

Product Varunummer	PLUS stödhandtag för hörn 762 x 762 mm RT126035		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (12 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (12 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		