


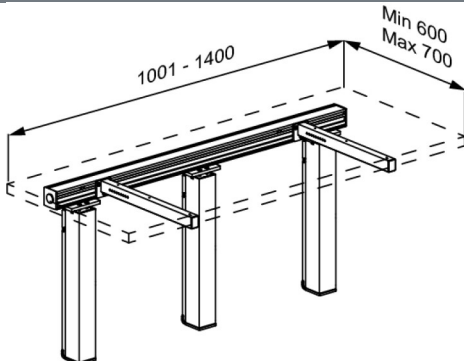

PRESSALIT®

Product Varunummer	INDIVO lyftenhet för bänkskiva 1001-1400 mm RK1451000
	EAN:5708590378909
Färg	Vit
Beskrivning	 Pressalit INDIVO lyftenheter kan enkelt integreras i det privata hemmet, vilket säkerställer att hela familjen kan njuta av den fulla potentialen och använda den höjdjusterbara funktionen. Lyftenheterna kan också bidra till att ge en flexibel kökslösning för t.ex. vårdcentraler, skolkök och skolans vetenskapslaboratorier, där det finns ett behov av frekventa höjdjusteringar på köksbänkar och skåp. INDIVO lyftenhet för bänkskiva, med tre motorer och kontrollbox. Inkl. tvärprofil och två konsoler. Höjdreglerbar upp till 300 mm med sargströmbrytare eller manöverdosa. Till bänkskiva i längd 1 001-1 400 mm. Ange längd och djup på bänkskiva vid beställning. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar Höjdjustering	Höjdreglerbar 300 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 150 kg, inklusive egenvikten för bänkskiva. Belastningen måste vara jämnt fördelad på bänkskivan.
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 20 mm/s Hastighet ner: 20 mm/s
Ljudnivå	45 dB
Material	Pelare: Pulverlackerat stål Tvärprofil: Aluminium Konsoler: Pulverlackerat stål
Ergonomi	En elektrisk köksbänk med justerbar höjd är idealiskt i alle situationer där olika brukare - sittande såväl som stående - använder samme kök. Det kan vara ett privat kök eller på större anläggningar med gemensamma köksfaciliteter, som till exempel gruppboenden.



PRESSALIT®

Product Varunummer	INDIVO lyftenhet för bänkskiva 1001-1400 mm RK1451000
Funktioner Motor Kontrollbox Manöverdosa Strömförbrukning (max.belastning)	Lyftenhetar höjjusteras antingen via strömbrytare i framkant eller med en manöverdosa. DL17 Deskline (Linak) 70N, IP20 CBD6S (Linak) IP20 HB53 (Linak), IPX1 Strömförbrukning vid maximal belastning: 300 W Strömförbrukning vid standby: 2 W
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

Product	INDIVO lyftenhet för bänkskiva 1001-1400 mm
Varunummer	RK1451000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8657 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



Product Varunummer	INDIVO lyftenhet för bänkskiva 1001-1400 mm RK1451000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (9 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (9 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (9 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.