


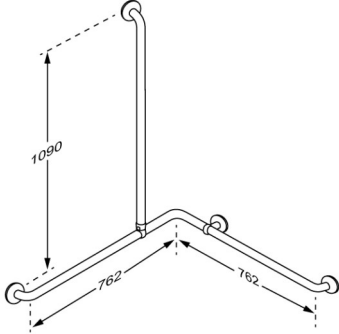

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b> | PLUS Eckhaltegriff-Kombination 762 x 762 x 1090 mm<br>RT136108  |
| <b>Farbe</b>                           | VVS:777568608<br>NRF:6317188<br>EAN:5708590154060<br>HMI: 25428<br>NBS:N13:436<br>Dunkelblau (RAL 5011)   |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>       |  <p>PLUS Haltegriffe sind qualitativ hochwertige Produkte, die vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bieten, und der Einrichtung des funktionellen Badezimmers den letzten Schliff verleihen. Eine stabile Haltegriffösung mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten kann den Weg zu mehr Autonomie erleichtern.</p> <p>PLUS Eckhandlauf-Kombination, Durchmesser 33 mm, rechts/links drehbar, A: 762 mm x B: 762 mm x C: 1090 mm, zur Festmontage.<br/>Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 50 mm und vereinfacht es damit den Griff zu greifen.<br/>Inkl. Wandrosette, die die Schrauben verdeckt.<br/>Materialien: Pulverlackiertes Aluminium und Kunststoff.<br/>Exkl. Wandbefestigungen.</p> |
| <b>Produktkapazität</b>                | Maximale Belastung: 235 kg.<br>Bei einer Belastung der Haltegriff mit 235 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 56 kg belastet.<br><i>Die Haltegriffe wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen aus DIN/ISO 17966:2016 mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 geprüft.</i>   |
| <b>Materialien</b><br><b>Ergonomie</b> | Pulverbeschichtetes Aluminium<br>Abdeckkappen aus Cycloy Kunststoff<br>Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm.<br>Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand.<br>Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.   |
| <b>Garantie</b>                        | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgetauscht oder neu geliefert werden.   |





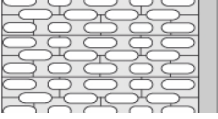

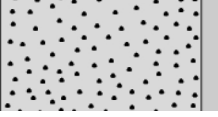
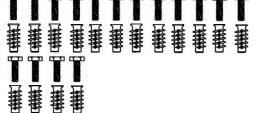
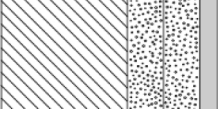
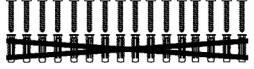


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Produkt</b>                     | PLUS Eckhaltegriff-Kombination 762 x 762 x 1090 mm  |
| <b>Produktnummer</b>               | RT136108  |
| <b>Reinigung</b>                   | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge.<br/>Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättssprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b><br/>Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p> <p>Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.</p> |
| <b>Konformitäts-<br/>erklärung</b> |   |







|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Eckhaltegriff-Kombination 762 x 762 x 1090 mm |
| <b>Produktnummer</b> | RT136108   |
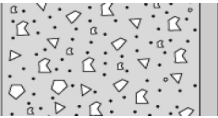
## Montage in verschiedenen Wandtypen

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8618 - Befestigungsmaterial, 16 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.   |    |
|   | <b>Vollziegel &gt;= Mz12</b><br>V8618 - Befestigungsmaterial, 16 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.   |    |
|  | <b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b><br>V8618 - Befestigungsmaterial, 16 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.   |  |
|  | <b>Porenbeton P4</b><br>V8668 - Befestigungsmaterial, 16 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6.<br>Muss separat bestellt werden.   |  |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b><br>V8618 - Befestigungsmaterial, 16 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).<br>Muss separat bestellt werden. |  |

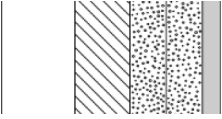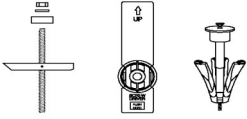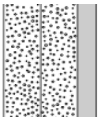

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>  | PLUS Eckhaltegriff-Kombination 762 x 762 x 1090 mm<br>RT136108  |   |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b><br>Befestigungsmaterial (16 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |    |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b><br>Befestigungsmaterial (16 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.         |    |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b><br>Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.   |  |