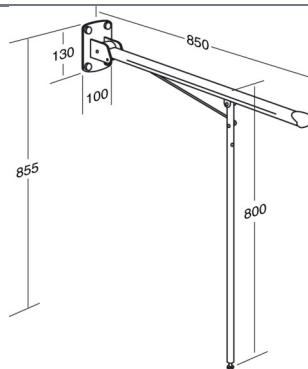




PRESSALIT®

Product Varunummer	VALUE toalettarmstöd, fast höjd R1102000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS:615722380 NRF:6191677 RSK:7972411 EAN:5708590192345 HMI: 29695 NBS:N13:436 DB: 2109684 FDA:ILS/D135866 VALUE toalettarmstöd med ben, fast höjd, uppfällbara, längd 850 mm, användningshöjd 800 mm. Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar. Inkl. monteringsskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat. VALUE toalettarmstöd med ben, fast höjd, uppfällbara, längd 850 mm, användningshöjd 800 mm. Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar. Material: Rilsan-belagt stål, tryckformat aluminium, plast. Inkl. monteringsskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.
Justerbar	Fast höjd
Produktkapacitet	Max belastning: 135 kg. När toalettarmstödet belastas med 135 kg, belastas varje fästskruv med 81 kg.
Material	Toalettarmstöden är tillverkad av rostfritt stål med en Rilsan-belagd yta som är skön att röra vid, lätt att rengöra och skyddar mot rost. Ändpluggarna är gjorda av nylon (PA).
Ergonomi	Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar. Bred stödyta för hand och arm. En bra hjälp när du sitter, står eller flyttning till och från toaletten.
Funktioner	Stöden kan fällas upp när den inte används.





PRESSALIT®

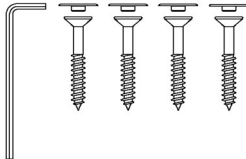
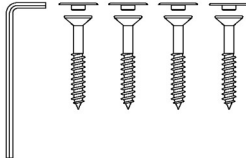
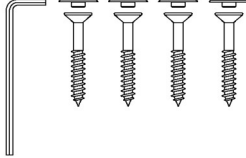
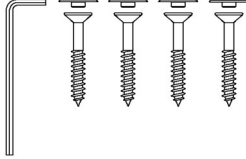
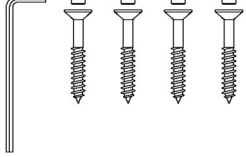
Product	VALUE toalettarmstöd, fast höjd
Varunummer	R1102000
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.



PRESSALIT®

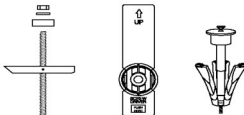
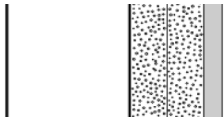
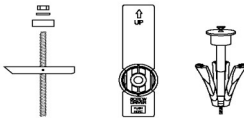
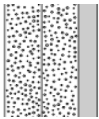
Product	VALUE toalettarmstöd, fast höjd
Varunummer	R1102000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8593 - 4 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8593 - 4 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8593 - 4 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8593 - 4 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8593 - 4 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	VALUE toalettarmstöd, fast höjd R1102000
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

Inkl. skruvar till vägg. Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekta pluggs användas. Se monteringsanvisning.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®