




PRESSALIT®

Article Numéro article	VALUE siège rabattable pour la douche avec piètement support, montage fixe R1602000
Couleur	VVS:777526435 NRF:6191657 RSK:7973958 EAN:5708590185927 HMI: 25572 NBS:N13:448 Blanc
Description	 <p>Le siège et le dossier de douche pliants VALUE créent une solution simple pour les utilisateurs qui ont besoin de s'asseoir pendant la douche.</p> <p>Siège douche, rabattable, avec piètement support, assise: gris clair. Pour montage fixe, vis de montage incluses</p>
Réglage Capacité du produit	Montage fixe Charge maximale admissible: 125 kg.
Matériaux Ergonomie Fonctions	Aluminium moulé sous pression, laqué par poudrage. Acier revêtu de Rilsan qui est confortable à toucher, facile à nettoyer et qui protège contre la corrosion. La part en plastique est fait de polyéthylène (PE) moulé sous vide. <i>Testé d'inflammabilité (ISO 8191-1 et ISO 8191-2). Rapport de test disponible.</i> Abattant en plastique thermodurci (urée). Une assise de forme ergonomique avec une surface agréable. Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace Avec piètement support Avec rainures de drainage
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.

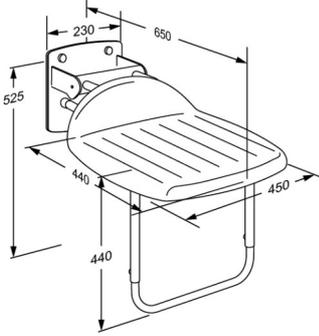

PRESSALIT®

Article	VALUE siège rabattable pour la douche avec piètement support, montage fixe
Numéro article	R1602000
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface. Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Surfanios Premium</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>
Déclaration de conformité	<p>Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.</p>

pressalit.com