




PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	CareSystem chaise de douche 410, réglable en hauteur manuellement R7166000
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Description</b>	 <p>Chaise douche 410 avec dossier et accoudoirs, réglable en hauteur de 340 mm (assise) Sans fixations murales. Supprimé le 31/12-2015</p> <p>Chaise douche 410 avec dossier et accoudoirs, réglable en hauteur de 340 mm (assise) Sans fixations murales. Supprimé le 31/12-2015</p>
<b>Réglage</b>	Réglable en hauteur
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale admissible: 150 kg.
<b>Matériaux</b>	<p>Matière de base: 20 my Aluminium anodisé.</p> <p>Siège et dossier: Mousse expansée douce avec armature en bois.</p> <p>Surface de siège et dossier: vernis élastique</p> <p>Surface d'accoudoirs: plastique à deux composants.</p> <p>Extrémité d'accoudoirs: Arnite</p> <p>Levier de commande: Acier inoxydable avec extrémité en nylon</p> <p>Bandeau et cache-vis, glissière: Polystyrène plastique (PS)</p>

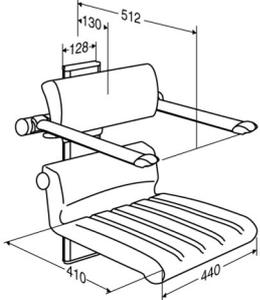

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	CareSystem chaise de douche 410, réglable en hauteur manuellement R7166000
<b>Ergonomie</b>	La forme ovale des accoudoirs garantit une bonne préhension et un appui satisfaisant.  Revêtement doux et confortable, jamais froid au toucher.  Surface d'assise: 410mm-440mm, design ergonomique.
<b>Fonctions</b>	Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace  Réglable en hauteur de 340 mm - l'assise et le dossier sont réglables en hauteur, indépendamment l'un de l'autre
<b>Nettoyage</b>	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.