


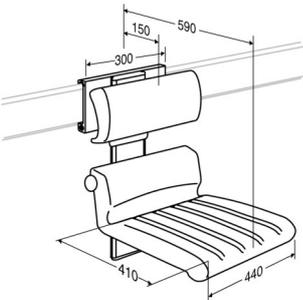

Article Numéro article	CareSystem chaise de douche 410, réglable en hauteur manuellement et latéralement R7565000
Couleur	Blanc
Description	 <p>Chaise douche 410 avec dossier, réglable en hauteur de 330 mm (assise), pour montage sur glissière horizontale (non comprise). Supprimé le 31/12-2015</p> <p>Chaise douche 410 avec dossier, réglable en hauteur de 330 mm (assise), pour montage sur glissière horizontale (non comprise). Supprimé le 31/12-2015</p>
Réglage	Réglable en hauteur et latéralement
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 150 kg.
Matériaux	Matière de base: 20 my Aluminium anodisé. Siège et dossier: Mousse expansée douce avec armature en bois. Surface de siège et dossier: vernis élastique Lever de commande: Acier inoxydable avec extrémité en nylon Bandeau et cache-vis, glissière: Polystyrène plastique (PS)
Ergonomie	Revêtement doux et confortable, jamais froid au toucher. Surface d'assise: 410mm-440mm.
Fonctions	Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace Réglable en hauteur de 340 mm Pour montage sur glissière horizontale



PRESSALIT®

Article	CareSystem chaise de douche 410, réglable en hauteur manuellement et latéralement
Numéro article	R7565000
Nettoyage	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®