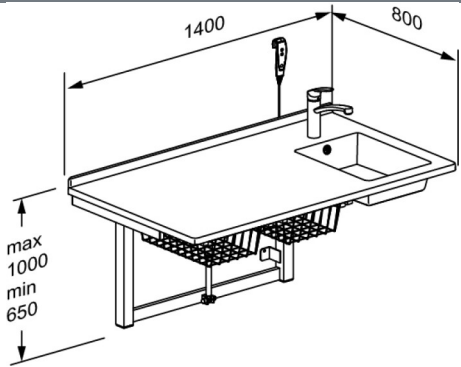




PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask R8732000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777630220 NRF: 7501916 EAN: 5708590286242 HMI: 48875  Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme. Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet. Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur. "Vägghängt skötbord med med vask, 800 x 1 400 mm. Med elmotor och transformator, höjdjustering från 650 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Formgjuten bänkskiva med inbyggd vask, inkl. kran - engreppsblandare med utdragbar handdusch, till- och avloppsslangar, 2 trådkorgar. Material: ABS-plast/akrylplast och pulverlackerat stål. Exkl. monteringskrav för vägg."
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	350 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 75 kg.
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 14 mm/s Hastighet ner: 14 mm/s
Ljudnivå	48 dB



PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask R8732000
Material	Lyftenhet och korgar: Pulverlackerat stål. Bänkskiva: ABS-plast/akrylplast. Avloppsslagen: Polyuretan, PVC och stål. Den flexibla avloppsslagen är motståndskraftig mot både fysisk och kemisk påverkan. Den är flamskyddsbehandlad och klarar temperaturer från -30°C till +110°C.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA31 Descline (Linak), 1500N, IPX1
Kontrollbox	CBD6 (Linak), IP20
Manöverdosa	HB30 (Linak), IPX4
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W Strömförbrukning vid standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

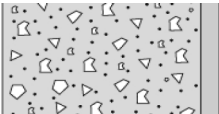
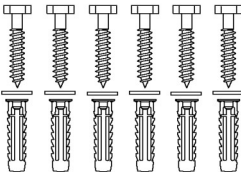
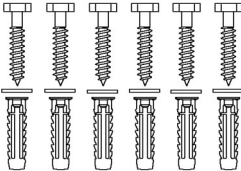
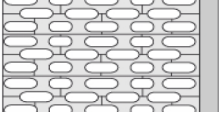
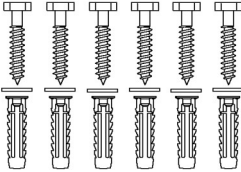
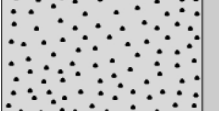
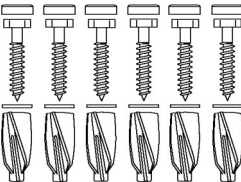
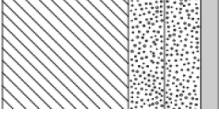
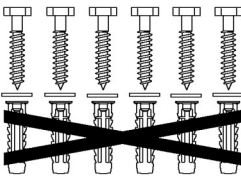
Product	Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask
Varunummer	R8732000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av: - Maskindirektivet 2006/42/EEG - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®

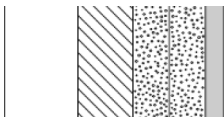
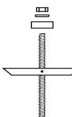
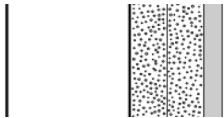
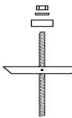
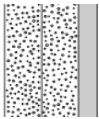
Product	Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjddreglerbart, med vask
Varunummer	R8732000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask R8732000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		

pressalit.com