


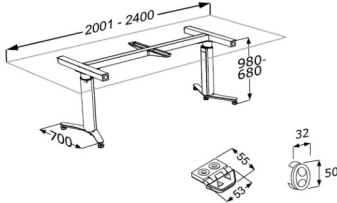

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Freistehende Hubeinheit für Arbeitsplatte, elektrisch höhenverstellbar RK1082
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>EAN: 5708590293783 HMI: 61267</p>  <p>Der Name INDIVO bezieht sich auf die individuellen Verstellmöglichkeiten der Hubeinheiten.</p> <p>Elektrische Hubeinheit für freistehende Arbeitsplatte, Länge 2001 - 2400 mm. 300 mm höhenverstellbar. Inkl. 2 Teleskopbeinen, Träger, Längs- und Querprofile und Betätigungsschalter.. Pressalit empfiehlt besidseitig 400 mm Platten überstand, um dieAnfahrt im Rollstuhl zu erleichtern.. Gewünschte Länge bei Auftragserteilung angeben.</p>
<b>Verstellung</b> <b>Höhenverstellung</b> <b>Produktkapazität</b> <b>Aufwärtsgeschwindigkeit</b> <b>Geräuch</b>	Höhenverstellbar 300 mm Die Maximalbelastung der Hubeinheit beträgt 100 kg, gleichmässig auf der Tischplatte verteilt. Geschwindigkeit aufwärts: 20 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 20 mm/s 45 dB
<b>Materialien</b>	Materialien: Teleskopbein: Aluminium, ABS-Kunststoff Träger: Stahl Querstrebe: Aluminium Kabelrinne: ABS-kunststoff Schalter: ABS-Kunststoff Oberflächenbehandlung: Träger: Pulverbeschichtung (grau RAL 9006)



<b>Produkt</b>	Freistehende Hubeinheit für Arbeitsplatte, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	RK1082
<b>Ergonomie</b>	<p>Eine frei stehende elektrische Indivo-Lösung ist ein flexibler Arbeits- Ess- oder Aufenthaltplatz, der sich vor allem für die Nutzung in der Küche eignet. Diese Lösung ist dem jeweiligen Benutzer und der Nutzungssituation schnell und einfach in der Höhe anzupassen.</p> <p>Eine frei stehende Arbeitsplatte kann auch in einem Raum eine Lösung sein, in dem die Wände wandhängende Modelle nicht tragen können.</p>
<b>Funktionen</b>	<p>Hubeinheiten werden mit Hilfe von Schaltern an der Zarge oder direkt unter der Arbeitsplatte in der Höhe verstellt.</p> <p>Die Betätigungsschalter können nach Wunsch angebracht werden.</p> <p>Die Form der Beine und Füße machen die Arbeitsplatte stabil und gewährleisten, dass die Hubeinheit den Rollstuhlfahrer so wenig wie möglich behindert.</p> <p>Die Konstryktion der Hubeinheit ermöglicht die Nutzung der Arbeitsplatte von alle Seiten.</p> <p>300 mm in der Höhe verstellbar.</p> <p>In willkürlichen Längen von 1400 bis zu 3000 mm und Breiten zwischen 700 un 1000 mm erhältlich.</p>
<b>Motor</b>	DB4 Deskline (Linak) 1000 N, IP22
<b>Steuerkasten</b>	CBD4 (Linak) IP22
<b>Stromverbrauch (max. Belastung)</b>	Stromverbrauch, maximal Belastung: 300 W Stromverbrauch, standby: 2 W
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



<b>Produkt</b>	Freistehende Hubeinheit für Arbeitsplatte, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	RK1082
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b> Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p> <p>Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.</p>

**WEEE**



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	Freistehende Hubeinheit für Arbeitsplatte, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	RK1082

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®