




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar RK1110
Beschrijving	EAN: 5708590292755 HMI: 54799  De naam INDIVO verwijst naar de individuele configuratie van de producten. Handmatige bedienbare lift voor werkblad Lift voor werkblad, met krukas hendel Inclusief 2 dragers Lengtes van 600-1000mm. In hoogte verstelbaar 300mm. Incl. Bevestigingsset voor bakstenen muur. Gelieve gewenste lengte te vermelden bij het bestellen
Verstelbaarheid Product capaciteit	In hoogte verstelbaar Maximale belasting (gelijkmatig verdeeld): 100 kg inclusief werkblad.
Materialen Ergonomy	Materiaal: Telescopische poot: aluminium, ABS-kunststof Dwarsdragers: aluminium Dragers: staal handmatige bediengshendel: staal Oppervlaktebehandeling: Dragers: poeder gelakt (grijs RAL 9006) Keuken werkbladen die kunnen worden aangepast in hoogte met een draaibare hendel zijn een kostengunstige oplossing voor keukens gebruikt voor zowel zittende en staande gebruikers. Deze worden meestal gebruikt in keukens die niet frequent of dagelijks worden aangepast.

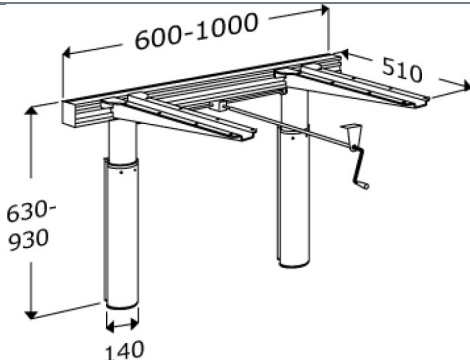

Product Artikelnummer	Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar RK1110
Functie	Handmatige bedienbare liften worden in hoogte aangepast met een krukas hendel. Ze kunnen worden gebruikt met werkbladen, met of zonder rand. De hendel kan overal langs de voorzijde worden geplaatst, behalve onder een gootsteen of kookplaat. Liften kunnen worden aangepast aan de meeste standaard keuken componenten. Liften zijn beschikbaar voor werkbladen van elke lengte tussen 600 mm en 3000 mm. Hoogte verstelbaar 300 mm.
Garantie Reiniging	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum. Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.



PRESSALIT®

Product	Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	RK1110

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®