




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Løfteenhed til bordplade, manuelt højderegulerbar RK1112
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>EAN: 5708590292779 HMI: 54801</p>  <p>Navnet INDIVO relaterer til produkternes individuelle konfiguration.</p> <p>Manuel løfteenhed til bordplade, med håndsving Inkl. 3 bæringer Længde fra 1401-2000 mm. 300 mm højderegulerbar. Inkl. monteringsbolte til massiv mur.. Ønsket længde angives ved bestilling.</p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Produktkapacitet</b>	Højderegulerbar Maksimal belastning (jævnt fordelt): 100 kg inkl. bordplade.
<b>Materialer</b>	Materiale: Teleskopben: Aluminium, ABS-plast Tværprofiler: Aluminium Bæringer: Stål Håndsving: Stål Overfladebehandling: Bæringer: Pulverlakerede (grå RAL 9006)
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

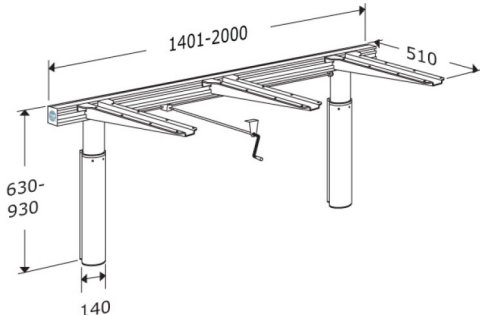

<b>Produkt</b>	Løfteenhed til bordplade, manuelt højderegulerbar
<b>Varenummer</b>	RK1112
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> <p><b>WEEE</b> Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.</p>



PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	Løfteenhed til bordplade, manuelt højderegulerbar
<b>Varenummer</b>	RK1112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®